

4talk4

COMMUNICATIONS SYSTEM

INSTALLAZIONE

4Talk4 è stato progettato come strumento da tavolo. L'angolazione della superficie frontale è stata ottimizzata per migliorare la facilità d'uso; 4Talk4 può essere posizionato su un banco, sul tavolino di una carrozzina, o avvitato utilizzando i fori filettati M4 posizionati sotto la base. Le viti di fissaggio non sono fornite in dotazione.

Prima di poter utilizzare 4Talk4 occorre inserire le batterie (4 pile tipo 'C'). Consulta il prossimo paragrafo con le Istruzioni per l'inserimento delle batterie.


ISTRUZIONI PER L'INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Per inserire le batterie (4 pile tipo 'C' da 1,5 V), svitare le grosse viti e rimuovere la copertura sul fondo dell'ausilio. Inserire le batterie, assicurandosi che le polarità siano posizionate come indicato all'interno del coperchio che avete smontato. Richiudete l'ausilio. Non usate batterie al Litio; si consiglia l'impiego di batterie alcaline. Gettate le pile esaurite negli appositi raccoglitori.

ISTRUZIONI D'USO


I diagrammi sotto riportati raffigurano le parti frontale e posteriore e forniscono una descrizione dei principali comandi e componenti dell'ausilio.

- 1 ON/OFF:** Premete una volta per accendere e premete nuovamente per spegnere. Se non usato, l'ausilio si spegne automaticamente dopo 30 minuti, allo scopo di preservare la carica delle batterie. Per riaccenderlo, premete di nuovo il tasto ON/OFF.
- 2 VOLUME +:** Questo pulsante aumenta il volume dei messaggi riprodotti. Se mantenete premuto il pulsante, verrà ripetuto il messaggio 'Volume up' (in italiano: 'Volume su') ad un volume crescente; quando avete raggiunto il volume desiderato, rilasciate il pulsante.
- 3 VOLUME -:** Questo pulsante diminuisce il volume dei messaggi riprodotti. Se mantenete premuto il pulsante, verrà ripetuto il messaggio 'Volume down' (in italiano: 'Volume giù') ad un volume via via decrescente; quando avete raggiunto il volume desiderato, rilasciate il pulsante.

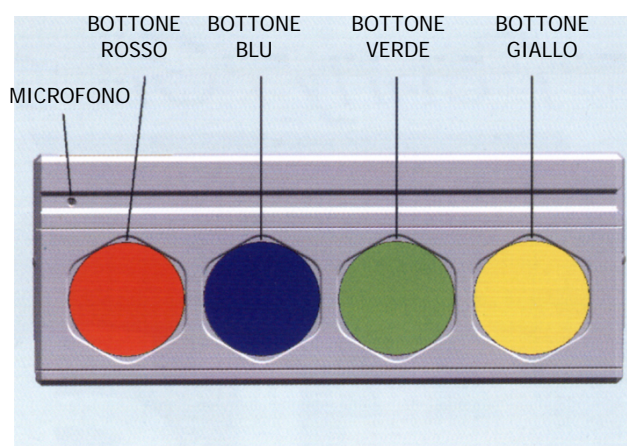

4 TOY ON/OFF (GIOCATTOLI

ON/OFF): E' possibile collegare a 4TALK4 anche giocattoli adattati, attraverso le prese 'Toys' (giocattoli) indicate in figura 2. I giocattoli devono essere adattati, impiegando gli appositi cavetti acquistabili presso Auxilia o altri produttori. Spostando l'interruttore TOY ON/OFF a sinistra o a destra sarà possibile abilitare o disabilitare la modalità di attivazione dei giocattoli. Se questa modalità è abilitata, il giocattolo è attivato quando viene premuto il pulsante corrispondente; il giocattolo continuerà a funzionare per tutta la durata del messaggio vocale associato al pulsante. Se non vi sono giocattoli collegati all'ausilio, si raccomanda di l'interruttore TOY ON/OFF rimanga nella posizione OFF, per preservare la carica delle batterie.

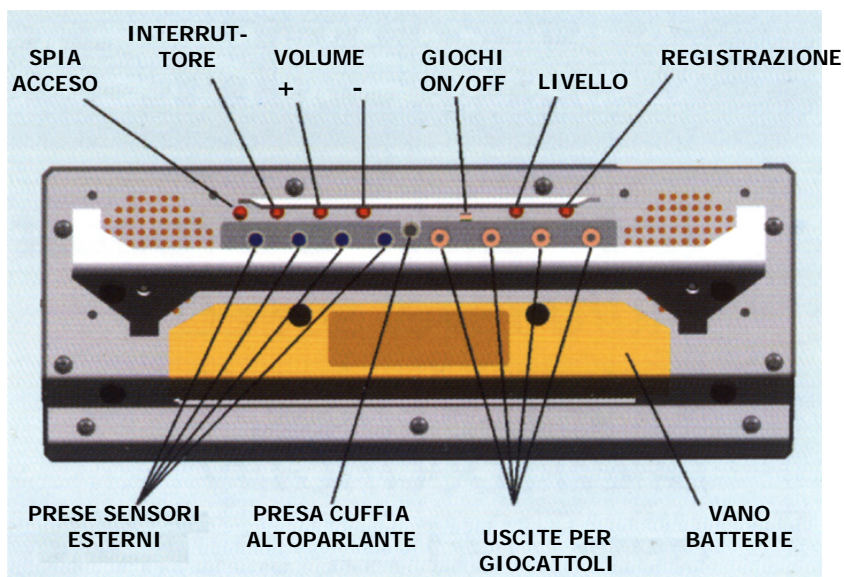

5 LEVEL (LIVELLO): 4TALK4 permette di memorizzare 4 messaggi su 4 livelli diversi, per un totale di 16 messaggi. Per passare da un livello all'altro, premere e mantenere premuto il tasto LEVEL; un messaggio scandirà il passaggio da un livello all'altro: 'Level one' (Livello uno), 'Level two' (Livello due), 'Level three' (Livello tre), Level four (Livello quattro). Rilasciate il pulsante quando avete raggiunto il livello desiderato. Dopo il livello quattro la successione ricomincia dal livello uno.

6 RECORD: Per registrare un messaggio, premere il tasto RECORD assieme al tasto colorato al quale desiderate abbinarlo. Attendete l'indicazione 'Record now' ("Registra ora") emessa dall'ausilio, quindi iniziate a parlare ad una distanza di circa 20-30 centimetri dal microfono. Terminata la registrazione, rilasciate il tasto RECORD. Per la registrazione scegliete un ambiente silenzioso: i rumori di fondo possono peggiorare molto la chiarezza dei messaggi riprodotti.

7 RIPRODUZIONE DEI MESSAGGI: Per riprodurre i messaggi registrati, è sufficiente che l'utente prema uno dei quattro grandi pulsanti colorati posti sul pannello frontale. Questi pulsanti forniscono un feedback tattile, ed è sufficiente una lieve pressione della mano o del dito per attivarli. Non occorre mantenere premuto il pulsante durante l'emissione del messaggio.

ALTRE CARATTERISTICHE

PRESE PER SENSORI ESTERNI:

Alcuni utenti possono incontrare difficoltà ad azionare i pulsanti colorati di 4Talk4. Sul pannello posteriore dell'ausilio sono state inserite quattro prese alle quali è possibile collegare altrettanti sensori esterni; ogni presa riporta il colore di ciascuno dei tasti principali. Ciascun sensore avrà quindi la stessa funzione dei corrispondenti tasti del pannello frontale.

BUSTA PER I SIMBOLI:

I tasti di 4Talk4 sono parzialmente ricoperti da una griglia rimovibile. Al di sotto della griglia si trova una busta trasparente con quattro tasche, ciascuna posizionata in corrispondenza di un tasto. Questa soluzione permette di sovrapporre a ciascun tasto un simbolo o una immagine di riferimento per il messaggio registrato, proteggendole dall'usura.

CUFFIA (HEADPHONE) E ALTOPARLANTE (SPEAKER):

Sempre sul pannello posteriore è presente una presa che consente di collegare un'altoparlante o una cuffia per adattare la riproduzione dei messaggi di 4Talk4 ad usi o ambienti diversi.

MANUTENZIONE

QUESTO AUSILIO NON CONTIENE PARTI CHE RICHIEDANO MANUTENZIONE

L'ausilio funziona a batteria; periodicamente le batterie devono essere sostituite. Se richiesto un intervento di riparazione, l'ausilio deve essere rispedito a:

AUXILIA s.a.s.
www.auxilia.it
Via Vaccari, 72 - 41100 Modena
Tel.: 059 216311 - Fax: 059 220543
Email: info@auxilia.it

Le seguenti condizioni invalidano la certificazione CE:

- Riparazioni o modifiche non autorizzate
- L'utilizzo all'esterno della classe, dell'ufficio, della casa
- L'utilizzo in prossimità di forti campi magnetici (come nei pressi di interruttori sottoposti ad alta tensione, stufe di riscaldamento a induzione, saldatrici ad arco o nelle immediate vicinanze di trasmettitori radio-televisivi, telefonici o radar ad alta potenza).
- L'utilizzo su veicoli di terra, mare o aria, o in diretta applicazione medica.
- L'utilizzo dell'ausilio quando questo è danneggiato.
- In ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa EN60950 (sicurezza dei dispositivi di 'Information Technology') questo ausilio deve essere utilizzato con batterie adatte e correttamente montate.
- QUESTO PRODOTTO NON DEVE ESSERE CONNESSO ALLA RETE 220V.

Le seguenti condizioni possono danneggiare l'ausilio:

- Illuminazione intensa, diretta o indiretta, o impulsi elettromagnetici nucleari cui sia esposta l'attrezzatura o qualunque dispositivo collegato all'attrezzatura sistema, sia funzionante che non funzionante.
- Esporre l'attrezzatura a radiazioni ionizzanti che superino ampiamente il livello medio ambientale.
- Il collegamento alla rete elettrica 220 V anche attraverso trasformatori a bassa tensione.
- Immersione in acqua o in soluzioni acquose.
- Applicazione di sostanze chimiche e solventi che possano deteriorare i polimeri ABS o causare una rapida corrosione dell'alluminio, del rame o dell'acciaio.
- Utilizzo al di fuori del campo di temperatura compreso fra 0° e 55° centigradi; evitare di lasciare l'attrezzatura in ambienti al di sopra dei 55° centigradi.
- Abusi meccanici che possano causare impatti violenti con oggetti pesanti; evitare di applicare una forza eccessiva durante il normale uso.

GARANZIA

Auxilia garantisce che tutti i propri prodotti sono esenti da difetti nei materiali impiegati e nelle lavorazioni, per un periodo di 24 mesi dalla data di ricevimento del materiale da parte del cliente.

Questa garanzia non si applica a materiali manomessi da persona non autorizzata o danneggiati a causa di uso improprio. Gli oggetti in garanzia sono riparati senza spese a carico del cliente, fatte salve le spese di spedizione.


www.auxilia.it

