

Adattatore seriale per 3 sensori



L'adattatore permette di collegare al computer fino a tre sensori singoli attraverso una porta seriale.

L'installazione dell'adattatore può avvenire anche a computer acceso, collegando lo spinotto in una presa seriale libera del computer. Evitate di collegare l'adattatore ad una presa seriale nella quale sia installato un modem o altra periferica.

All'interno del programma a scansione che dovete utilizzare, impostate il collegamento del sensore

attraverso porta seriale; nei programmi in lingua inglese la porta seriale è denominata "Serial Port" o "COM Port", mentre l'adattatore viene denominato "Serial Box", "Serial Switch Box" o "Serial Switch". All'interno delle impostazioni del vostro programma dovete impostare anche se l'adattatore è collegato alla porta seriale 1, denominata COM1, oppure alla porta seriale 2, denominata COM2. Sul pannello posteriore del computer di norma le porte seriali non sono contrassegnate da 1 o 2: procedete quindi per tentativi:

- impostate inizialmente la porta seriale COM1 nei parametri del programma;
- collegate all'adattatore uno o due sensori singoli, a partire dalle prese più vicine al cavo;
- provate il funzionamento della scansione; se i sensori non funzionano, provate a collegarli nelle altre prese libere dell'adattatore;
- nel caso non funzioni, impostate sul programma la porta seriale COM2 e riprovate.

Ulteriori informazioni sul funzionamento della scansione e sul collegamento dell'adattatore potrete reperirle sulla documentazione del software che state usando o contattando il fornitore del programma.

Garanzia

Auxilia garantisce che tutti i propri prodotti sono esenti da difetti nei materiali impiegati e nelle lavorazioni, per un periodo di 24 mesi dalla data di ricevimento del materiale da parte del cliente. Questa garanzia non si applica a materiali manomessi da persona non autorizzata o danneggiati a causa di uso improprio. Gli oggetti in garanzia sono riparati senza spese a carico del cliente, fatte salve le spese di spedizione.

Per ulteriori informazioni contattare:

auxilia

Auxilia s.a.s.

Via Vaccari, 72 - 41100 Modena

Tel. 059 216311 Fax 059 220543 e-mail info@auxilia.it