

Tastiera Bigkeys LX

Note d'uso

Traduzione a cura di:

Auxilia s.a.s.

Via Vaccari, 72 - 41100 Modena

Tel. 059-216311 Fax 059-220543 email info@auxilia.it

Collegamento della tastiera

Per connettere BigKeys al computer, staccate la tastiera standard e collegate BigKeys. Se la presa di collegamento al computer è più larga, potete usare l'adattatore fornito in dotazione.

Per evitare di dover collegare alternativamente BigKeys e la tastiera standard, o comunque per poter disporre di entrambe le tastiere simultaneamente collegate al computer, occorre un adattatore accessorio chiamato Co-Pilot. Per informazioni, rivolgetevi ad Auxilia (tel. 059 216311).

Importante

Questa tastiera speciale è stata progettata in nord America. La sua disposizione dei tasti ricalca quella delle tastiere americane. La tastiera normale del vostro computer, invece, sarà certamente una tastiera italiana, dotata sulla destra dei tasti con le lettere vocali minuscole accentate: **ò à ù è ì**.

Dopo aver collegato questa tastiera speciale al computer, riscontrerete che alcuni tasti, come l'apostrofo, non funzionano a dovere. Per ovviare a questo problema, occorre variare la impostazione della nazionalità della tastiera.

Su Windows 95/98 procedete come segue:

- 1) Fate doppio click sull'icona **RISORSE DEL COMPUTER**.
- 2) Fate doppio click sull'icona **PANNELLO DI CONTROLLO**.
- 3) Fate click sulla icona **TASTIERA**.
- 4) Fate click sulla linguetta **Impostazione Internazionali** oppure **Internazionale**.
- 5) Fate click sul bottone **AGGIUNGI**.
- 6) Ora aprite l'elenco delle nazionalità.
- 7) Scegliete la nazionalità **INGLESE (Regno Unito)**.
- 8) Una volta evidenziata la nazionalità, fate click su **OK**.
- 9) Fate click su **Imposta come predefinite**.
- 10) Fate click su **APPLICA**.
- 11) Fate click su **OK**.

Su Windows XP procedete come segue:

- 1) Fate click sul pulsante **Avvio** sulla **Barra delle applicazioni**.
- 2) Fate click su **Pannello di Controllo**.
- 3) Fate doppio click su **Opzioni Internazionali e lingua**.
- 4) Fate doppio click sulla linguetta **Lingue**.
- 5) Fate click sul bottone **Dettagli**.
- 6) Fate click sul bottone **Aggiungi**.
- 7) Ora aprite l'elenco della **Lingua di Input**.
- 8) Scegliere la lingua **Inglese (Stati Uniti)**.
- 9) Fate click sul **OK**.
- 10) Ora aprite l'elenco della **Lingua di Input predefinita**.
- 11) Selezionate **INGLESE(Stati Uniti)**.
- 12) Fate click sul **OK**.
- 13) Riavviate il sistema.

Verificate che si sia acceso un indicatore in basso a destra sullo schermo con l'abbreviazione della nazionalità della tastiera: **IT** per la tastiera italiana o **IN** o **EN** per tastiera inglese.

Caratteristiche di BigKeys LX

- **TASTI PER MUOVERE IL CURSORE: PgUp, End, PgDn, Home**

Per accedere a queste funzioni, tenete premuto il tasto **F** : i tasti con le frecce direzionali diventeranno PgUp (*Pagina Su*), End (*Fine*), PgDn (*Pagina Giu*) e Home (*Inizio*).

- **TASTI FUNZIONE**

Per accedere ai tasti funzionali da F1 a F10, tenete premuto il tasto **F** e premete contemporaneamente il numero corrispondente; ad esempio, per ottenere F4, premete il tasto **F** assieme al numero **4**.

- **AUTORIPETIZIONE**

BigKeys LX non produce nessuna autoripetizione dei caratteri: anche tenendo un tasto premuto a lungo, la tastiera invia al computer un solo carattere. Questa caratteristica permette di prevenire la selezione involontaria di più caratteri in sequenza.

- **MODO ASSISTITO**

BigKeys LX dispone di una modalità di lavoro, detta MODO ASSISTITO, che va incontro alle esigenze degli utenti che non sono in grado di premere contemporaneamente due o più tasti.

Sul vostro computer esistono già alcune facilitazioni di questo tipo: esse si trovano nell'Accesso Facilitato di Windows, all'interno del Pannello di Controllo. Il MODO ASSISTITO di BigKeys LX, integra queste facilitazioni. In alcuni casi (come vedrete di seguito), sarà necessario combinare insieme l'Accesso Facilitato di Windows e il MODO ASSISTITO di BigKeys LX per ottenere il più alto grado di facilitazione per l'utente.

Quando non utilizzate il MODO ASSISTITO, potete accedere ai tasti funzione premendo contemporaneamente la lettera F e un numero (ad esempio F+1 produce il tasto funzione F1, F+2 il tasto funzione F2, etc.)

Per entrare nel MODO ASSISTITO di BigKeys LX premete il tasto CAPS LOCK tre volte, in successione. Ora, il MODO ASSISTITO di BigKeys LX fa sì che quando voi premete la lettera F, questa rimanga premuta fino a quando voi non selezionerete un altro tasto. La lettera F è divenuta, dunque, un tasto bistabile.

Vediamo due esempi dell'uso del MODO ASSISTITO in BigKeys LX:

1. per ottenere il tasto funzione F1 con la modalità assistita premete la lettera F, rilasciatela e poi premete il tasto 1
2. per ottenere Alt-F4 con la modalità assistita premete il tasto Alt, rilasciatelo, premete il tasto F e rilasciatelo e, infine premete il tasto 4.

Importante:

per ottenere questa facilitazione non bastano le sole personalizzazioni di BigKeys LX. Dovete anche ricorrere all'Accesso Facilitato di Windows. Aprite il Pannello di Controllo di Windows, sul vostro computer, selezionate Accesso Facilitato e, nella sezione Tastiera, attivate l'opzione Usa Tasti Permanenti.

Per uscire dal MODO ASSISTITO premete nuovamente il tasto CAPS LOCK tre volte, in successione.

IMPORTANTE:

nel Modo Assistito è necessario premere il tasto **F** due volte per ottenere la lettera "F".

Disposizione ABC o QWERTY

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	
	Z	X	C	V	B	N	M		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
	T	U	V	W	X	Y	Z		

BigKeys LX vi permette di cambiare il tracciato della tastiera, sia che abbiate scelto una disposizione dei tasti ABC o una disposizione QWERTY.

Per farlo, agite sul piccolo interruttore che si trova all'interno di una fessura, sotto la tastiera. Girate la tastiera in modo da avere di fronte a voi l'etichetta col nome del produttore, orientata correttamente per la lettura: la fessura che contiene l'interruttore si trova sul bordo sinistro della tastiera. Utilizzate la punta di una penna o uno strumento simile per agire sull'interruttore.

Spostando l'interruttore, potrete cambiare il tracciato dei tasti.

Se avete una disposizione ABC, dopo aver agito sull'interruttore, alla lettera A corrisponderà la Q, alla lettera B corrisponderà la W e così via.

Se avete una disposizione QWERTY, dopo aver agito sull'interruttore, alla lettera Q corrisponderà la A, alla lettera W corrisponderà la B e così via.

Naturalmente, poiché la posizione fisica dei tasti rimane la stessa, sarà necessario che interveniate manualmente (applicando etichette o altro) per cambiare anche l'aspetto esteriore dei tasti.

Anche se BigKeys è una tastiera robusta, si sconsiglia di variare la posizione dei tasti più di una volta.

Accessori di BigKeys LX

- **Scudo copri tastiera in materiale acrilico trasparente:** questo accessorio può facilitare alcuni utenti nella selezione del tasto e prevenire la pressione involontaria di altri tasti; la superficie dello scudo può altresì offrire un buon appoggio per la mano. La facilità di montaggio e smontaggio dello scudo facilita l'adattamento della tastiera per utenti diversi e ne agevola la pulizia.
- **Adattatore Co-Pilot:** questo accessorio consente di collegare contemporaneamente BigKeys e la tastiera standard al computer.
- **Adattatore USB:** questo accessorio permette di utilizzare BigKeys in collegamento ad una presa USB del computer

Garanzia

Auxilia garantisce che tutti i propri prodotti sono esenti da difetti nei materiali impiegati e nelle lavorazioni, per un periodo di 24 mesi dalla data del ricevimento del materiale da parte del cliente.

Questa garanzia non si applica a materiali manomessi da persona non autorizzata o danneggiati a causa di uso improprio. Gli oggetti in garanzia sono riparati senza spese a carico del cliente, fatte salve le spese di spedizione.

BigKeys LX è prodotta da: KCS Ltd., Southampton, U.K.

Per ulteriori informazioni contattare:

**Auxilia s.a.s. - Via Vaccari, 72 - 41100 Modena
Tel. 059 216311 - Fax 059 220543 email info@auxilia.it**