

Istruzioni d'uso per
BIGmack[®] e LITTLEmack[™]
ausili per la comunicazione



Ausilio BIGmack[®]



Ausilio LITTLEmack[™]

BIGmack[®] e LITTLEmack[™] sono prodotti da:
AbleNet inc. - Minneapolis, U.S.A.


Distributore italiano:
AUXILIA s.a.s.
Via Vaccari, 72
41100 MODENA
Tel: 059 216311
Fax: 059 220543
E-mail: info@auxilia.it
Sito Internet: www.auxilia.it

Sommario

Alcune idee per l'uso degli ausili BIGmack [®] e LITTLEmack [™]	3
Istruzioni per la configurazione di BIGmack [®] e LITTLEmack [™]	5
Caratteristiche avanzate	6
Base protettiva per LITTLEmack [™]	10
Opzioni di fissaggio	11
Altri sistemi di fissaggio	12
Garanzia	12
Spedizione per riparazioni	13

L'efficacia della comunicazione


Molte persone apprendono meglio attraverso lo svolgimento di attività pratiche. Lo stesso vale per la comunicazione. È importante che tutti gli individui abbiano la possibilità di imparare a comunicare direttamente attraverso la comunicazione stessa. Provate, allora, a seguire queste indicazioni per incoraggiare gli utenti a dedicarsi alla comunicazione nelle attività da loro svolte, durante l'intero arco della giornata.

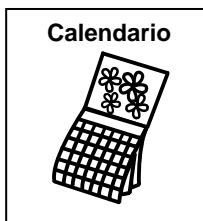

Calendario

Incontro del mattino


- I giorni della settimana: "Oggi è venerdì".
- Il tempo atmosferico: "Oggi è una giornata molto ventosa".

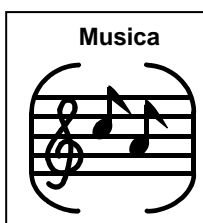

Musica

Musica


- Presentazione di una canzone: "Oggi canteremo *Nella vecchia fattoria*".
- Cantare un ritornello: "Nella vecchia fattoria ia ia oh!".

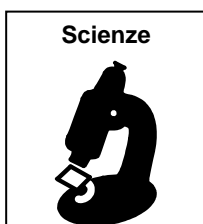

Scienze

Matematica e scienze

- Presentare un esperimento di scienze: "Venite qui intorno per sentire di che cosa tratta l'esperimento che faremo oggi".
- Formulare delle domande o fornire delle risposte: "Chi sa contare per multipli di 5?"

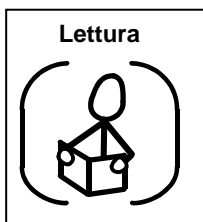

Lettura

Lettura

- Chiedere a qualcuno di leggere un libro: "Vuoi leggere un racconto insieme a me?"
- Esprimere un giudizio sul racconto letto: "Questo racconto mi è piaciuto molto".



Artistica

Artistica

- Richiedere i materiali necessari alla realizzazione di un progetto: "Oggi faremo delle sculture. Puoi passarmi l'argilla, per favore? Grazie".
- Fornire o chiedere informazioni agli altri sul progetto realizzato: "Ehi, venite a vedere il cane che ho scolpito. Voi che scultura avete fatto?"


Per avere altre idee che possano coinvolgere gli studenti nelle attività di comunicazione quotidiane, visitate il sito di AbleNet: www.ablenetinc.com (in lingua inglese).

BIGmack®


Visto dall'alto

Altoparlante

Superficie dell'ausilio

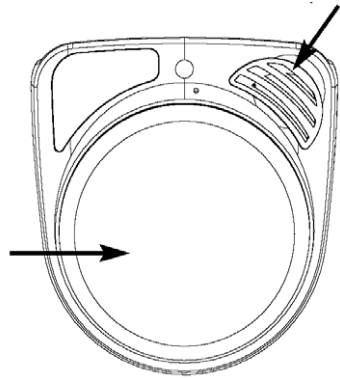

Visto dal basso

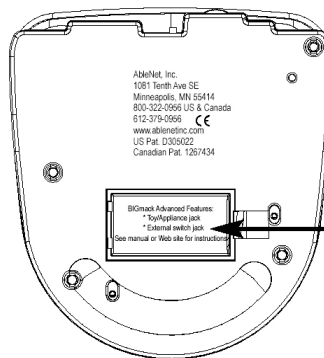

Sportellino della batteria


BIGmack®

- 75 secondi di registrazione
- Area del bersaglio di circa 12,5 cm.
- Altezza: circa 5 cm.

Include (anche se non mostrati nella figura):

- coperchio per interruttore a scatto
- cavo per altri dispositivi o giocattoli

Visto da dietro

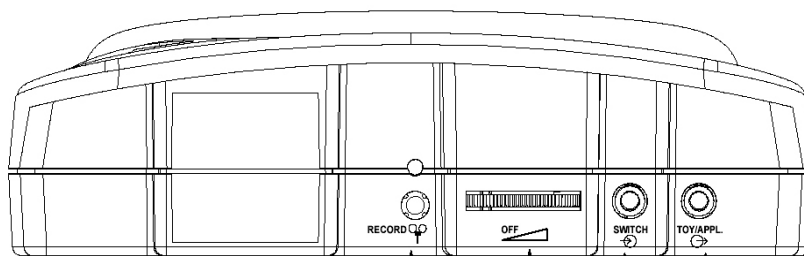

Botone di registrazione

Regolazione del volume

Spinotto per giocattoli o altri dispositivi


Spinotto per sensore esterno

LITTLEmack™


Visto dall'alto

Superficie dell'ausilio

Altoparlante

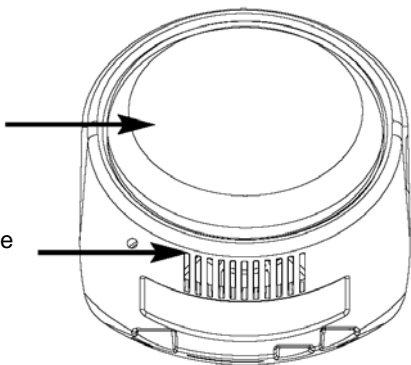


Visto dal basso

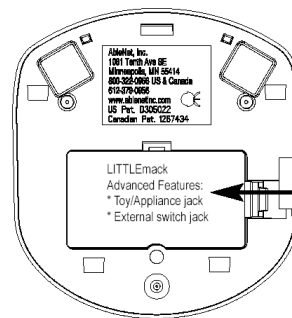

Sportellino della batteria

Visto da dietro

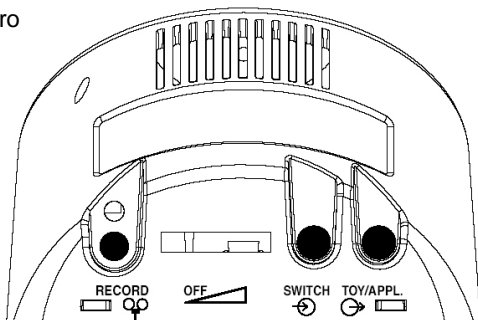

Botone di registrazione

Regolazione del volume

Spinotto per giocattoli o altri dispositivi

Spinotto per sensore esterno

LITTLEmack™

- 75 secondi di registrazione
- Area del bersaglio di circa 6,2 cm.
- Altezza: circa 7,5 cm.

Include (anche se non mostrati nella figura):

- coperchio per interruttore a scatto
- cavo per altri dispositivi o giocattoli
- base protettiva

Istruzioni per la configurazione di BIGmack® e LITTLEmack™



Fase 1 – Installazione della batteria

Nota: per LITTLEmack™, per accedere allo sportellino della batteria, prima dovete rimuovere la base protettiva (vedete il relativo paragrafo nelle pagine successive).


- Togliete lo sportellino della batteria.
- Inserite una pila da 9 volt.
- Richiudete lo sportellino.

Nota: assicuratevi che la pila sia nuova e che i poli siano posizionati correttamente. **Vi consigliamo di utilizzare batterie alcaline ad alta capacità.**



Fase 2 – Registrazione dei messaggi

- Accendete l'ausilio.
- Premete e tenete premuti contemporaneamente sia il bottone di registrazione **Record**, sia la superficie dell'ausilio (la spia luminosa inizierà a lampeggiare).
- Registrate il messaggio desiderato, parlando con un tono di voce normale (non ad alta voce) a circa 10-15 cm. dal microfono
Esempio di messaggio: "Sai che Parigi è la capitale della Francia?"
- Rilasciate sia il bottone di registrazione, sia la superficie dell'ausilio.

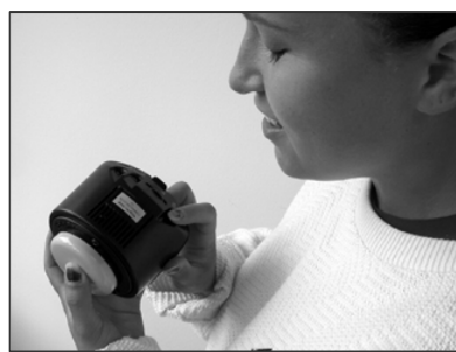

Fase 3 – Ascolto dei messaggi


Premete la superficie dell'ausilio e regolate il volume in base alle vostre esigenze.

Cappuccio trasparente

Insieme all'ausilio BIGmack® o LITTLEmack™, troverete un cappuccio di plastica trasparente. Utilizzatelo per fissare figure o simboli sulla superficie del vostro ausilio, che risulteranno così protetti dalla saliva e dall'usura.

Caratteristiche avanzate

Riproduzione di un messaggio con un sensore esterno

1. Inserite qualsiasi sensore esterno reperibile in commercio con una presa di 3,5 mm. nell'apposito spinotto per sensore , che si trova su BIGmack® o LITTLEmack™.
2. Registrate il messaggio sull'ausilio BIGmack® o LITTLEmack™.
3. Per riascoltare il messaggio registrato, premete il sensore esterno.



Uso di BIGmack® o LITTLEmack™ con giocattoli o altri dispositivi

Giocattoli o dispositivi funzionanti a batteria

Questa caratteristica vi consente di attivare un giocattolo o un altro dispositivo funzionante a batteria per la durata del messaggio, utilizzando BIGmack® o LITTLEmack™. Per poter avvalervi di questa caratteristica, sono necessari giochi o dispositivi a pila, una piccola lima rotonda e un adattatore per dispositivi a batteria (in vendita separatamente). Se il vostro dispositivo è già adattato, passate al punto 3.



Giocattolo / dispositivo funzionante a batteria



Lima



Adattatore per dispositivi a batteria

1. Aprite lo sportellino della batteria del giocattolo e, utilizzando con la lima, praticate una tacca nello sportellino della batteria per consentire il passaggio del cavetto adattatore.




2. Collocate il disco in rame dell'adattatore tra il polo positivo o quello negativo della batteria e il collegamento. Richiudete lo sportellino della batteria.




3. Registrate un messaggio nell'ausilio BIGmack® o LITTLEmack™ (per la registrazione dei messaggi, vedete le pagine precedenti).


Esempio di messaggio: "Guarda come balla il mio piccolo pinguino! Non è fantastico?"

Nota: il giocattolo o il dispositivo funzionerà soltanto per la durata del messaggio.

4. Inserite il cavo del giocattolo/dispositivo nell'apposito spinotto che si trova sull'ausilio BIGmack® o LITTLEmack™ .

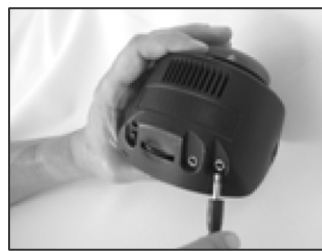

5. Inserite l'altra estremità del cavo del giocattolo nell'adattatore, mentre il giocattolo/dispositivo è collegato. Quindi, accendete il giocattolo/dispositivo.

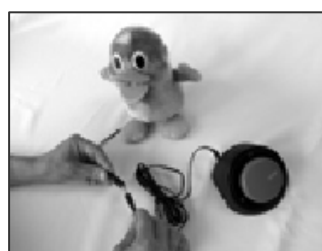

6. Premete la superficie di BIGmack® o LITTLEmack™ per sentire la riproduzione del messaggio e attivate il giocattolo/dispositivo.



Nota: se desiderate che il giocattolo/dispositivo continui a funzionare oltre la durata del messaggio, dovrete dotarvi anche dell'unità Switch Latch and Timer (SLAT) – disponibile presso Auxilia – che vi permette di scegliere una modalità temporizzata.



Switch Latch and Timer (SLAT)




Esempio di configurazione

Per ulteriori informazioni sull'unità SLAT, visitate il sito www.ablenetinc.com (in lingua inglese) e il sito www.auxilia.it.

Giocattoli/dispositivi elettrici

Con questa caratteristica, potete attivare un dispositivo elettrico utilizzando l'ausilio BIGmack® o LITTLEmack™. Per potervi avvalere di questa funzione, sono necessari il dispositivo *PowerLink*® 3 e il dispositivo o il giocattolo funzionante a corrente elettrica (in vendita separatamente).

1. Registrate un messaggio nell'ausilio BIGmack® o LITTLEmack™ (vedete le pagine precedenti).
Esempio di messaggio: "Potremmo usare una piccola lampada".
2. Inserite il cavo del giocattolo/dispositivo nell'apposito spinotto che si trova sull'ausilio BIGmack® o LITTLEmack™ .



3. Inserite l'altra estremità del cavo del giocattolo/dispositivo nello spinotto per sensore 1 o 2, che si trova sul dispositivo *PowerLink*® 3.



4. Inserite il dispositivo *PowerLink*® 3 nella presa del muro.
5. Inserite il dispositivo elettrico nella presa corrispondente di *PowerLink*® 3. Quindi, accendete il dispositivo.
6. Impostate il lasso di tempo desiderato su *PowerLink*® 3.
7. Premete la superficie dell'ausilio BIGmack® o LITTLEmack™ per sentire la riproduzione del messaggio e attivate il dispositivo elettrico per il lasso di tempo da voi impostato in *PowerLink*® 3.



Base protettiva per LITTLEmack™

L'ausilio LITTLEmack™ è provvisto di una base protettiva staccabile.




Come staccare la base protettiva da LITTLEmack™

1. Premete la levetta sporgente, verso il basso.
2. Fate scorrere leggermente la base verso l'esterno.

Come attaccare la base protettiva da LITTLEmack™


1. Posizionate i quattro incastrì sporgenti della base protettiva in corrispondenza delle quattro rientranze sul fondo di LITTLEmack™.
2. Premete fino a quando non udite un *click*.

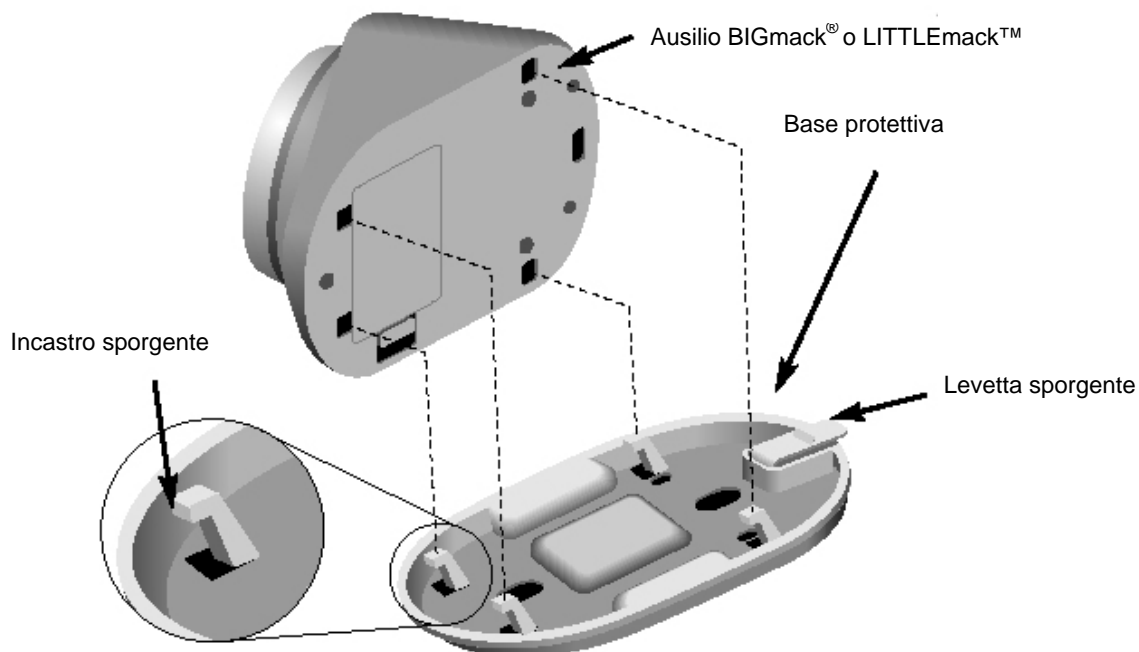

Opzioni di fissaggio


Collocazione provvisoria al muro della base protettiva (figura 1)

1. Posizionate la base protettiva (con la levetta rivolta verso il basso e le quattro sporgenze rivolte verso di voi) sulla parete. Fate un punto con una matita sul muro, in corrispondenza del restringimento dei due fori più grandi.
2. Fate un foro col trapano sui punti segnati e inserite le due viti, lasciandole sporgere alcuni millimetri.
3. Posizionate i due fori grandi della base protettiva sulle viti e avvitate fino a quando la base è perfettamente aderente alla parete.
4. Ora l'ausilio può essere fissato alla base sul muro.

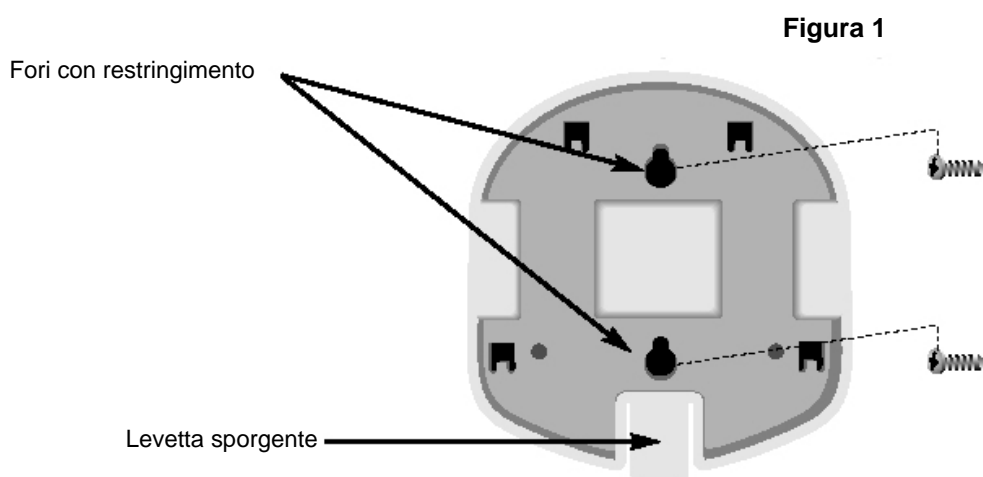


Collocazione stabile della base protettiva al muro (figura 2)

Avvitate la base protettiva direttamente al muro utilizzando tre viti: una collocata nel foro largo in alto e le altre due collocate nei due forellini più piccoli in basso.

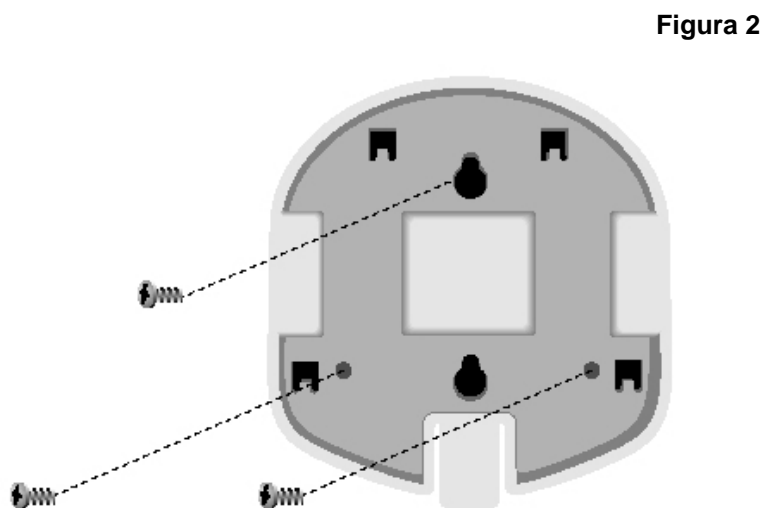

Collegamento della base protettiva al piatto triangolare piccolo

Quando utilizzate la base protettiva di LITTLEmack™ con un sistema di supporto prodotto da AbleNet, attaccate la base protettiva al piatto triangolare piccolo, servendovi delle viti e dei dadi ad alette che vengono forniti unitamente al piatto triangolare. Così facendo, potrete attaccare e staccare il vostro LITTLEmack™ da un sistema di fissaggio, senza difficoltà.

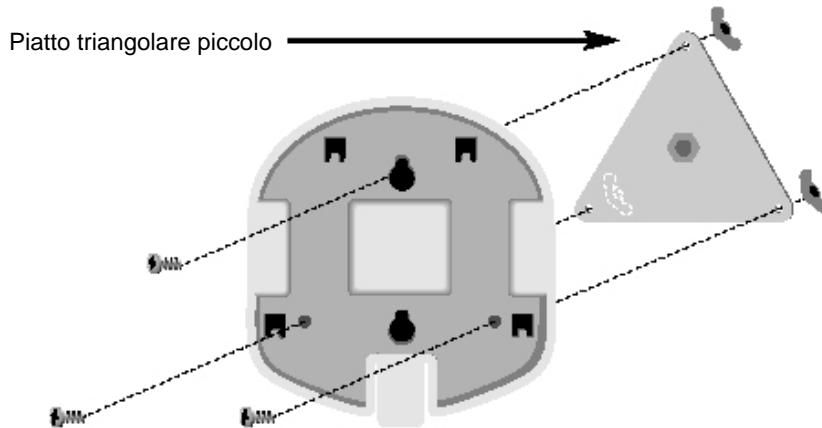

Altri sistemi di fissaggio

(disponibili, su richiesta, presso Auxilia)

- *Ultrastick* o *Dual Lock* per fissare l'ausilio su superfici piane o verticali.
- *Travel Strap* per attaccare BIGmack® o LITTLEmack™ ad una cintura o su una spalla.
- Sistemi di fissaggio:
 - sistema di fissaggio universale con Maniglia
 - sistema di fissaggio universale con Leva
 - *Slim Armstrong*
 - Cuscinetto piatto *Sensitrac*
 - Cuscinetto *Sensitrac* con braccio snodabile

Nota: quando richiedete un sistema di fissaggio, specificate sempre le dimensioni del piatto triangolare (che può essere piccolo o grande).

Per ulteriori informazioni sui sistemi di fissaggio, visitate il sito www.ablenetinc.com (in lingua inglese) e il sito www.auxilia.it.



Garanzia

Auxilia s.a.s. garantisce che tutti i propri prodotti sono esenti da difetti nei materiali impiegati e nelle lavorazioni, per un periodo di 24 mesi dalla data di ricevimento del materiale da parte del cliente. Questa garanzia non si applica a materiali manomessi da persona non autorizzata, o danneggiati a causa di uso improprio.

Gli oggetti in garanzia sono riparati senza spese a carico del cliente, fatte salve la spese di spedizione.

Spedizione per riparazioni

Se si rende necessario, potete rispeditare il dispositivo ad Auxilia. Ecco ciò che occorre fare:

- imballate l'ausilio e il caricabatteria, preferibilmente utilizzando la confezione originale, all'interno di un cartone resistente e ben imbottito di materiale inerte. **Sigillate il cartone con cura** prima di affidarlo alla posta o al corriere;
- spedite tutti i componenti e gli accessori che avete ricevuto nell'imballo originale;
- l'indirizzo per la spedizione è: **AUXILIA s.a.s. – VIA VACCARI, 72 – 41100 MODENA**;
- prima di spedire telefonate (059/216311) per fornire una descrizione sintetica dei malfunzionamenti riscontrati;
- accludete al pacco una breve lettera contenente:
 - il vostro nome, indirizzo e numero di telefono
 - il numero di serie dell'ausilio
 - i riferimenti della fattura d'acquisto
 - le note sui malfunzionamenti
 - la modalità di spedizione utilizzata