

# ***Comboard***

***Ausilio di comunicazione***

*Comboard è prodotto da: T.A.S.H. Inc., Ontario, Canada*

**Traduzione a cura di Auxilia**

**auxilia**

Auxilia s.a.s.  
Via Vaccari, 72 - 41100 Modena  
Tel 059 216311 Fax 059 220543 e-mail [info@auxilia.it](mailto:info@auxilia.it)

[www.auxilia.it](http://www.auxilia.it)

**COMBOARD** è un' ausilio per la comunicazione particolarmente adatto a bambini piccoli con gravi difficoltà motorie, alle prime esperienze di comunicazione alternativa o alla scuola materna per partecipare a semplici attività didattiche (scegliere colori, forme, associare immagini, etc.). **COMBOARD** permette al bambino, fermando il movimento rotatorio di una freccia, di scegliere una figura desiderata. **COMBOARD** viene azionato mediante uno o due sensori singoli oppure un sensore multiplo.

## *Caratteristiche*

- Dimensioni: cm. 30x30.
- Controllo velocità di spostamento della freccia.
- Freccia regolabile.
- Due spinotti mini-jack

## *Come si usa*

1. collegate un sensore singolo nella presa mini-jack
2. premete e tenete premuto la superficie del sensore; quando la freccia è in prossimità della figura desiderata rilasciate il sensore
3. se state usando due sensori, l'altro sensore sposterà la freccia nella direzione opposta
4. per regolare la velocità di spostamento della freccia occorre ruotare la manopola situata posteriormente alla base di **COMBOARD**.

## *Sostituzione della batteria*

**COMBOARD** è alimentato da due pile di tipo D, alcaline. Cambiate le pile quando, alla velocità massima, il movimento rotatorio della freccia appare lento.

## *Garanzia*

Auxilia garantisce che tutti i propri prodotti sono esenti da difetti nei materiali impiegati e nelle lavorazioni, per un periodo di 24 mesi dalla data di ricevimento del materiale da parte del cliente. Questa garanzia non si applica a materiali manomessi da persona non autorizzata o danneggiati a causa di uso improprio.

Gli oggetti in garanzia sono riparati senza spese a carico del cliente, fatte salve le spese di spedizione.



Auxilia s.a.s.

Via Vaccari, 72 - 41100 Modena

Tel 059 216311 Fax 059 220543 e-mail [info@auxilia.it](mailto:info@auxilia.it)

[www.auxilia.it](http://www.auxilia.it)