

Lightwriter SL-87

Scheda sintetica parametri

Per accedere al Setup dell'ausilio, premere il tasto <Mem> seguito da <Replay> (il tasto azzurro in basso a destra). Per modificare una delle impostazioni, premere il tasto <+>.

Setups

... SPEECH ...

Volume: #####---	Regolazione del volume
Voice: Female	Scelta della voce (Male=maschile, Female=femminile)
Speak: Replay only	Ripetizione del messaggio (Replay only=solo premendo il tasto Replay, Each word=ogni parola, Every key=ogni tasto)
Speech rate: Normal	Velocità del parlato (Slow=lento, Brisk=accelerato, Fast=veloce)
Speech gaps: Medium	Pausa tra le parole (None=nessuna, Short=breve, Medium=media, Long=lunga)
AuditoryBrowse: Off	Lettura in voce dei messaggi dell'ausilio
Auditory vol: ##---	Volume riferito, al parametro precedente

... SOUNDS ...

Buzz sound: Bell	Scelta del suono del tasto verde di chiamata
Shift-buzz: Whizz	Scelta del suono del tasto verde di chiamata premuto assieme a <Shift>
Sound vol: ##--	Volume dei suoni
Musical-keys: #---	Tasti musicali

... DISPLAYS ...

Case: UPPER	Scrittura in maiuscolo o minuscolo
Text: Normal	Se impostato a Smart, viene automaticamente aggiunto uno spazio dopo la punteggiatura, etc.

VFD: Automatic Imposta la luminosità del display (Dim=risparmio delle batterie, Bright=sempre alla massima luminosità)

... KEYBOARD ...

Key click: #- Volume del 'click' di feedback acustico sulla pressione dei tasti

Key repeat: ##- Velocità di autorepeat

Key touch: Off Tempo di pressione dei tasti (soglia)

Tremor: None Latenza sulla pressione dei tasti

... GENERAL ...

Mem speed: Medium Velocità di scorrimento dei messaggi sul display

Port 1: None Permette di selezionare l'eventuale dispositivo esterno collegato alla Porta 1

Printer: MiniPrint Scelta del tipo di stampante

Print: Plain Scelta del tipo di grafica di stampa

Replay: Scroll Permette di impostare la funzione del tasto Replay (Scroll è la funzione standard)

Predict after: 2 [non attivo] permette di impostare dopo quante lettere prende avvio la predizione di parola.

... SCANNER ...

Auditory scan: Beep Tipo di feedback acustico sulla scansione (Beep=emette un 'bip' di tonalità crescente)

Auditory vol: ##--- Volume del feedback acustico sulla scansione

Scan speed: 7 Velocità di scansione

Scan accel: Off Uso delle accelerazioni sull'uso del sensore (utile per utenti esperti)

Scan pause: 5 Introduce una pausa regolabile dopo la selezione di una lettera, durante la quale, con un *doppio-click* del sensore, si annulla la selezione

Scan (1): Auto Scelta del tipo di scansione (Auto=automatica)

Scans: 5	Numero di cicli a vuoto di scansione di colonna prima di tornare alla scansione di riga
Scan release: No	Funzione del rilascio del sensore (valido solo con scansione automatica e con accelerazioni attivate – per utenti molto esperti)

Per avviare la scansione sul display grande, collegare semplicemente il sensore alla presa **Switch 1** sul lato destro.