

# Mouse&Caret Buddy™

Applied Human Factors™

**Distributore italiano:**

Auxilia S.a.s.

Via Vaccari, 72

41100 MODENA

Tel: 059/216311

Fax: 059/220543

Email: [info@auxilia.it](mailto:info@auxilia.it)

Sito internet: [www.auxilia.it](http://www.auxilia.it)

## Come avviare e arrestare *Mouse&Caret Buddy*<sup>TM</sup>

Per avviare *Mouse&Caret Buddy*<sup>TM</sup>, fate doppio clic sull'icona *Mouse&Caret Buddy*<sup>TM</sup> sul vostro desktop, oppure premete il bottone **Start** di Microsoft®Windows, selezionate la voce **Programmi**, quindi il programma “Mouse&Caret Buddy1.0” e il file d'esecuzione “Mouse&Caret Buddy 1.0”. Una volta che *Mouse&Caret Buddy*<sup>TM</sup> si sarà avviato, apparirà una “carota” sulla barra delle applicazioni di Microsoft®Windows. Potete anche fare in modo che *Mouse&Caret Buddy*<sup>TM</sup> venga avviato automaticamente quando avviate Microsoft®Windows (per ulteriori dettagli, consultate la guida in linea **Help**).

Per uscire da *Mouse&Caret Buddy*<sup>TM</sup>, fate clic sulla carota che appare sulla barra delle applicazioni di Microsoft®Windows, e apparirà la finestra di dialogo **Mouse&Caret Buddy Settings** (Impostazioni di Mouse&Caret Buddy). Per chiudere il programma, fate clic sul bottone **Exit** (Esci), che si trova nell'angolo in basso a destra di questa finestra.

## Come utilizzare *Mouse&Caret Buddy*<sup>TM</sup>

*Mouse&Caret Buddy*<sup>TM</sup> è davvero semplice da usare! Se *Caret Buddy*<sup>TM</sup> appare e vi dà fastidio, impedendovi una visione ottimale della vostra schermata, potete farlo scomparire puntando su di esso il puntatore del mouse. Se è *Mouse Buddy*<sup>TM</sup> ad impedirvi una visione perfetta, potete spostarlo utilizzando il mouse. Se l'immagine di *Mouse Buddy*<sup>TM</sup> è fissa e, digitando, *Caret Buddy*<sup>TM</sup> si sposta su *Mouse Buddy*<sup>TM</sup>, l'immagine di *Mouse Buddy*<sup>TM</sup> verrà nascosta, in modo da non interferire con la vostra visuale mentre digitate. *Mouse Buddy*<sup>TM</sup> riapparirà quando inizierete a muovere il mouse o qualsiasi altro sistema di puntamento che utilizzate.

Potete impostare sia *Mouse Buddy*<sup>TM</sup>, sia *Caret Buddy*<sup>TM</sup> affinché rimangano sempre visibili, sia quando vengono utilizzati (cioè, quando digitate per *Caret Buddy*<sup>TM</sup> e quando usate il mouse per *Mouse Buddy*<sup>TM</sup>), sia quando non vengono utilizzati (cioè quando non digitate per *Caret Buddy*<sup>TM</sup> e quando non usate il mouse per *Mouse Buddy*<sup>TM</sup>). Se le figure di *Caret Buddy* o di *Mouse Buddy* sono troppo vicine o troppo distanti dai loro cursori, potete regolare le rispettive posizioni, attraverso la finestra di dialogo **Mouse&Caret Buddy Settings** (Impostazioni di Mouse&Caret Buddy). Potete impostare rapidamente la posizione di *Caret Buddy*, tenendo premuto il tasto [Ctrl] della vostra tastiera e utilizzando il vostro mouse per trascinarlo nella posizione desiderata.

Quando utilizzate per la prima volta il programma, è probabile che dobbiate provare diverse posizioni e dimensioni, sia per *Mouse Buddy*<sup>TM</sup>, sia per *Caret Buddy*<sup>TM</sup>. Per accedere a tutte le opzioni di *Mouse&Caret Buddy*<sup>TM</sup>, fate clic sull'icona della “carota”, sulla barra delle applicazioni di Microsoft®Windows (cioè la barra sulla quale si trova il bottone **Start**). Facendo clic sull'icona che rappresenta la carota, apparirà la finestra di dialogo **Mouse&Caret Buddy Settings** (Impostazioni di Mouse&Caret Buddy).

## **La finestra di dialogo Mouse&Caret Buddy Settings (Impostazioni di Mouse&Caret Buddy)**

Tutte le opzioni disponibili sono contenute nella finestra di dialogo **Mouse&Caret Buddy Settings**, che si apre facendo clic sulla piccola icona che rappresenta una carota, che si trova sulla barra delle applicazioni di Microsoft®Windows. (dove si trova anche il bottone **Start**). Nei seguenti paragrafi, trovate una breve descrizione di ogni linguetta disponibile nella finestra di dialogo di cui sopra.

### **Linguetta Caret Buddy**

Per visualizzare tutte le opzioni relative a Caret Buddy™, fate clic sulla linguetta **Caret Buddy**, nella parte superiore della finestra di dialogo **Mouse&Caret Buddy Settings** (Impostazioni di Mouse&Caret Buddy).

Avete la possibilità di attivare o disattivare Caret Buddy™; di modificarne l'immagine; di decidere se farlo apparire sempre (opzione **Always**), solo quando viene utilizzato (opzione **When used**), oppure quando non viene utilizzato (opzione **When not being used**), insieme al tempo di ritardo. Potete, inoltre, modificare le dimensioni della figura; selezionare un colore nella figura affinché sia trasparente; e decidere il punto in cui volete che appaia la figura, in relazione al testo di "caret" (ad esempio, utilizzando gli "hotspot" e gli "offset").

Per ulteriori dettagli riguardo a queste opzioni, utilizzate la guida in linea (**Help**).

### **Linguetta Mouse Buddy**

Le stesse opzioni descritte per Caret Buddy sono disponibili per Mouse Buddy e vi si può accedere facendo clic sulla linguetta Mouse Buddy.

### **Linguetta Buddy Options (Opzioni Buddy)**

Facendo clic sulla linguetta **Buddy Options**, potete selezionare una funzione che consente di far avviare automaticamente *Mouse&Caret Buddy*™ quando avviate il vostro computer.

Per ulteriori informazioni a questo proposito, utilizzate la guida in linea (**Help**).

### **Linguetta About Mouse&Caret Buddy (Informazioni su Mouse&Caret Buddy)**

Facendo clic sulla linguetta **About Mouse&Caret Buddy**, potrete ottenere ulteriori informazioni sul programma *Mouse&Caret Buddy*™ (come, ad esempio, il numero della versione, l'azienda che lo ha realizzato, il principale informatico che si è occupato della sua progettazione, gli artisti grafici, e così via).

## Come installare *Mouse&Caret Buddy*<sup>TM</sup>

1. Inserite il CD di Mouse&Caret Buddy nella vostra unità per CD.
2. Aspettate qualche istante per vedere se il CD si avvia automaticamente. In caso contrario, utilizzate l'opzione **Esegui...**, nel menù **Start** di Windows<sup>TM</sup>, per avviare il programma **Setup** sul CD (ad esempio: "D:setup").
3. Seguite le istruzioni che appariranno sullo schermo.

### Per ulteriori informazioni, contattate:

Auxilia S.a.s.

Via Vaccari, 72

41100 MODENA

Tel: 059/216311

Fax: 059/220543

Email: [info@auxilia.it](mailto:info@auxilia.it)

Sito internet: [www.auxilia.it](http://www.auxilia.it)

### Accordo di licenza

Applied Human Factors, Inc., ha realizzato questo software e vi concede una licenza di utilizzo non esclusivo. Voi siete totalmente responsabili della selezione di questo programma per il vostro utilizzo, e dell'installazione, dell'uso e dei risultati che derivano dall'utilizzo del software.

Oltre alle limitazioni di cui sopra, questo programma, Mouse&Caret Buddy<sup>TM</sup>, vi è concesso in licenza alle seguenti condizioni:

- 1) questo programma non può essere utilizzato in una configurazione a multi-utenza. Se volete disporre di un sito o di una licenza, contattate Applied Human Factors, Inc.
- 2) potete fare una copia di riserva a fini d'archivio.

SE NON RISPETTATE LE CONDIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO, LA VOSTRA LICENZA CESSERÀ IMMEDIATAMENTE.

Questa licenza è regolata dalle leggi dello Stato del Texas e della Contea di Bexar.

Se questo accordo di licenza non è per voi accettabile, potete restituirci l'intera confezione del prodotto.

### LIMITI DELLA GARANZIA

IL PROGRAMMA MOUSE&CARET BUDDY, CONTENUTO IN QUESTA CONFEZIONE, VIENE FORNITO "COSÌ COM'È". NON ESISTE ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA. QUESTO INCLUDE MA NON È LIMITATO, A QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ, PER SCOPI O FUNZIONI PARTICOLARI. L'INTERO RISCHIO ASSOCIATO ALLA QUALITÀ O ALLE PRESTAZIONI DEL PROGRAMMA MOUSE&CARET BUDDY INCLUSO IN QUESTA CONFEZIONE, SPETTA A VOI. SE ESISTE QUALCHE DIFETTO, VI ASSUMETE IL CARICO DI TUTTI I COSTI DI RIPARAZIONE O REVISIONE. POICHÉ ALCUNI STATI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DELLE GARANZIE IMPLICITE, L'ESCLUSIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE NEI VOSTRI CONFRONTI. QUESTA GARANZIA VI CONFERISCE I DIRITTI LEGALI CHE POSSONO VARIARE DA STATO A STATO.

Applied Human Factors, Inc., non garantisce che le operazioni del programma Mouse&Caret Buddy soddisfino i vostri requisiti, o che le operazioni del programma non vengano interrotte o che siano prive di errore. Questo software vi fornisce assistenza qualora utilizzate programmi applicativi già predisposti per l'uso. Applied Human Factors, Inc., non esercita controlli sui diversi metodi di programmazione usati dai diversi rivenditori che producono software. Non si garantisce, pertanto, che questo programma funzioni perfettamente con tutti gli altri programmi.