

Muscular Switch



Manuale d'uso

Traduzione a cura di:

auxilia

Auxilia s.a.s.
Via Vaccari, 72 - 41100 Modena
tel. 059 216311 - Fax 059 220543 - E-mail: info@auxilia.it
www.auxilia.it

I -	Introduzione	3
II -	Componenti di Muscular Switch	3
III -	Installazione	3
IV -	Uso di Muscular Swicth.....	4
V -	Risoluzione dei problemi	5

IMPORTANTE

IL MUSCULAR SWITCH NON E' UN SISTEMA DI CHIAMATA.

VIENE USATO CON AUSILI DI COMUNICAZIONE, APPARECCHI ELETTRICI ECC....


NON COLLEGATE APPARECCHI CON PIU' DI 24V O 0.25 AMPS.

VERIFICATE CHE LA STRISCIA IN VELCRO NON PROVOCHI ALLERGIE SULLA VOSTRA PELLE.



VIENE FORNITO CON UNA PILA DA 9V.

SI CONSIGLIA DI TOGLIERE LA PILA DURANTE IL TRASPORTO O QUANDO IL SENSORE NON VIENE USATO PER LUNGO TEMPO.

**NON PREMETE SUL SENSORE.
NON PIEGATE IL SENSORE.**

- Collegate lo spinotto del sensore nell'ingresso dell'adattatore contraddistinto dal simbolo 
- Collocate il sensore sulla pelle (per esempio sulla fronte aiutandovi con la striscia di Velcro fornita).

Attenzione! La scelta della collocazione del sensore è molto importante: il movimento deve essere controllato e regolare, senza alcuna interferenza. Il sensore può essere fissato o con la striscia di Velcro fornita oppure con cerotto medico. Il sensore non deve essere premuto troppo sulla pelle e il cavetto bianco non deve muoversi.

- Collocate l'interruttore dell'adattatore nella posizione 
- Regolate la sensibilità del sensore in modo da evitare attivazioni involontarie.
- Ora, potete fare una prova: posizionate il sensore sulla punta del dito con cerotto medico, poi premete sulla superficie del sensore.
- Finita questa prova, è possibile collegare il **MUSCULAR SWITCH** ad un apparecchio utilizzando il cavo fornito in dotazione.
- Collegate uno dei due spinotti del cavo nell'ingresso dell'adattatore contraddistinto dal simbolo 

AVVERTENZA!: NON COLLEGATE APPARECCHI CON PIU' DI 24V O 0.25 AMPS.

IV - Uso di Muscular Swicth

- Spia luminosa del funzionamento:

La spia luminosa verde si accende quando il sensore è in funzione: si illumina per circa un secondo. Poi si spegne fino alla attivazione fino alla attivazione successiva.

- Tasto di temporizzazione contraddistinto da

Questo interruttore permette di impostare una temporizzazione tra una attivazione del sensore e l'altra. Questa regolazione può essere usata quando l'utente, dopo aver compiuto un movimento volontario, tende a produrne altri in modo involontario.

- Regolazione della vite di temporizzazione con il simbolo

Questa vite permette di personalizzare la temporizzazione da 0.5 secondi a 2 secondi. Durante questo tempo, la spia luminosa rossa rimane illuminata, indicando che non è possibile nessuna azione.

- Interruttore Acceso/Spento

Questo interruttore ha tre posizioni:

- una posizione STOP posizione centro
- una posizione ACCESO con BIP
- una posizione ACCESO senza BIP

V - Risoluzione dei problemi

L'adattatore non funziona, la spia luminosa verde non si illumina quando si compie un movimento.

<i>Cause</i>	<i>Soluzione</i>
La pila è scarica	Cambiate la pila.
Il sensore è danneggiato	Verificate il sensore e se necessario cambiatelo.
I cavi non sono ben collegati	Collegate i cavi correttamente.

Il sensore funziona ma non è sensibile

<i>Cause</i>	<i>Soluzione</i>
La pila è scarica	Cambiate la pila.
La regolazione della sensibilità non è buona	Modificate la regolazione della sensibilità.
Il sensore non è stato ben posizionato o è danneggiato	Posizionatelo nuovamente oppure cambiatelo se necessario.

Il sensore funziona ma è troppo sensibile

<i>Cause</i>	<i>Soluzione</i>
La pila è scarica	Cambiate la pila.
La regolazione della sensibilità non è buona	Modificate la regolazione della sensibilità.

Garanzia:

Auxilia garantisce che tutti i prodotti sono esenti da difetti nei materiali impiegati e nelle lavorazioni, per un periodo di 24 mesi dalla data di ricevimento del materiale da parte del cliente. Questa garanzia non si applica a materiali manomessi da persona non autorizzata o danneggiati a causa di uso improprio. Gli oggetti in garanzia sono riparati senza spese a carico del cliente, fatte salve le spese di spedizione.

Il sensore Muscular Switch è prodotto da: Proteor Services, Francia.

Per ulteriori informazioni:

AUXILIA S.A.S.

Via Vaccari, 72 - 41100 Modena

Tel. 059 216311 - Fax 059 220543 - E-mail: info@auxilia.it

www.auxilia.it