

PARTNER 4™ - Ver. 2004

Ausilio di comunicazione con uscita in voce



(prodotto da Advanced Multimedia Devices, Inc., U.S.A.)

PARTNER 4™ è un ausilio di comunicazione integrato, in grado di contenere 4 messaggi della durata di 8 secondi ciascuno. PARTNER 4™ è semplicissimo da utilizzare: basta accendere l'ausilio e regolare il volume.

Installazione delle batterie

1. Assicuratevi che l'ausilio sia spento, ruotando la manopola del volume in senso antiorario.
2. Capovolgete l'ausilio, e appoggiatelo su una superficie stabile.
3. Con l'aiuto di un cacciavite, rimuovete le due viti che fissano la copertura in plastica del vano delle batterie.
4. Rimuovete le batterie esaurite e sostituitele con quattro batterie AA nuove; si consiglia l'utilizzo di batterie alcaline. Prestate attenzione alla polarità delle batterie; la posizione corretta è indicata nel vano porta-pile.

**NON BUTTATE LE BATTERIE SCARICHE NELLA SPAZZATURA,
UTILIZZATE GLI APPOSITI CONTENITORI DI RICICLAGGIO.**

5. Riposizionate la copertura in plastica e fissate nuovamente le viti.

Registrazione dei messaggi

Nota: è importante che durante la registrazione dei messaggi il microfono non sia coperto da alcun impedimento.

Per registrare un messaggio seguite queste indicazioni:

- Accendete l'ausilio, ruotando in senso orario la manopola del volume.
- Posizionate la manopola in posizione intermedia rispetto agli estremi minimo-massimo di regolazione del volume.
- Premete e mantenete premuto il tasto rosso **Rec**;
- Contemporaneamente premete e mantenete premuto il tasto corrispondente al messaggio da registrare parlando vicino al microfono; terminata la registrazione del messaggio, rilasciate i due pulsanti.
- Quando parlate, avvicinatevi a circa quindici centimetri dal microfono. Potete riascoltare immediatamente il messaggio registrato; se la riproduzione risultasse "lontana" o tagliata, all'inizio o alla fine del messaggio, ripetete la procedura.

Riproduzione dei messaggi: selezione diretta

Seguite queste semplici indicazioni:

- Accendete l'ausilio, ruotando la manopola del volume in senso orario
- Regolate il volume al livello desiderato, con la stessa manopola
- Premete la casella corrispondente al messaggio da riprodurre.

Riproduzione dei messaggi con sensori esterni

Sul pannello posteriore dell'ausilio, sono presenti quattro prese, denominate **J 1 J 2 J 3 J 4**. Le prese **J 1** e **J 2** permettono di collegare un sensore esterno per attivare i primi due messaggi dell'ausilio; è possibile perciò offrire all'utente la possibilità di richiamare anche solo uno o due messaggi per volta, utilizzando il tipo di sensore più adatto alle sue abilità motorie. Le prese **J 3** e **J 4** possono invece essere utilizzate per azionare giocattoli e altri dispositivi esterni attraverso i Cavetti Adattatori o l'adattatore PowerLink.

Le tabelle di comunicazione

La sostituzione delle tabelle cartacee è una operazione abbastanza semplice: basta sfilare dal lato destro la tabella dall'ausilio ed inserirne una nuova nella stessa feritoia.

Per la preparazione delle tabelle di comunicazione potete utilizzare parole, disegni, fotografie o simboli. Sistemi grafici e linguaggi simbolici, come Bliss, PCS, PIC, Core e altri, possono costituire il materiale di base per la preparazione delle tabelle. La scelta del materiale visivo deve essere orientata dalle esigenze e dalle abilità dell'utente.

Per quanti avessero maggiore esperienza con gli interventi di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (C.A.A.) e nell'uso del computer, segnaliamo il programma BoardMaker, prodotto dalla Mayer-Johnson: è un software concepito per facilitare l'organizzazione del materiale visivo e la preparazione delle tabelle. Il programma è corredato della completa libreria di simboli P.C.S. .

Pulizia dell'ausilio

Non immergete l'ausilio in acqua! PARTNER 4™ può resistere alle gocce di pioggia ma subirebbe un grave danno se l'acqua entrasse dalle feritoie dell'altoparlante o dalle prese presenti sul pannello.

Per pulire l'ausilio utilizzate una spugna leggermente umida; se necessario, la superficie della spugna può essere inumidita con sapone neutro. Utilizzate solo acqua fredda. Asciugate poi accuratamente.

Cura e manutenzione dell'ausilio

Tenete l'ausilio spento quando non utilizzato.

Se **PARTNER 4™** sembra non funzionare correttamente, seguite queste indicazioni:

- Controllate che le batterie siano installate con la corretta polarità
- Controllate che l'ausilio sia acceso e che vi sia effettivamente un messaggio associato al tasto
- Assicuratevi che non vi siano ostruzioni alla pressione dei tasti
- Spegnete l'ausilio, attendete venti secondi, riaccendetelo e riprovate.
- Sostituite le batterie. Utilizzate solo batterie alcaline.

Garanzia

Auxilia garantisce che tutti i propri prodotti sono esenti da difetti nei materiali impiegati e nelle lavorazioni, per un periodo di 24 mesi dalla data di ricevimento del materiale da parte del cliente. Questa garanzia non si applica a materiali manomessi da persona non autorizzata o danneggiati a causa di uso improprio. Gli oggetti in garanzia sono riparati senza spese a carico del cliente, fatte salve le spese di spedizione.



Auxilia s.a.s.
Via Vaccari, 72 - 41100 Modena
Tel.: 059 216311 - Fax: 059 220543
Email: info@auxilia.it
