

Crick Serial Switch Box

Interfaccia Seriale per Sensori

Questa interfaccia per sensori vi permetterà di connettere uno o due sensori al computer attraverso una porta seriale.

ATTENZIONE!

Questa interfaccia è compatibile con il programma Clicker e con i prodotti a scansione della linea Cricksoft. Per verificare la compatibilità dell'interfaccia con altri programmi software, consultate il Produttore o il Rivenditore.

3 passi per impostare l'interfaccia

Passo 1. Localizzate la porta seriale

L'interfaccia deve essere collegata ad una delle porte seriali presenti sul pannello posteriore del computer. La maggioranza dei computer ha due porte seriali, denominate COM1 e COM2. Se il computer è un po' datato, il mouse potrebbe essere collegato ad una di queste porte seriali; in questo caso per l'interfaccia utilizzate la porta libera: **NON SPOSTATE IL MOUSE.**

Passo 2. Collegate l'interfaccia

La presa seriale è di forma trapezoidale e potrebbe avere 9 o 25 contatti. Il cavo dell'interfaccia termina con una spina a 9 contatti; nella confezione comunque trovate un piccolo adattatore per il collegamento ad una presa a 25 contatti. Per collegare l'interfaccia non occorre spegnere il computer.

Passo 3. Configurate il programma

Non occorre installare particolari driver software. Di norma occorre soltanto indicare, all'interno del programma che utilizzerete, a quale porta seriale (COM1 o COM2) avete collegato l'interfaccia. Consultate la documentazione del programma per avere informazioni su come effettuare questa impostazione.

Garanzia

Auxilia garantisce che tutti i propri prodotti sono esenti da difetti nei materiali impiegati e nelle lavorazioni, per un periodo di 24 mesi dalla data di ricevimento del materiale da parte del cliente. Questa garanzia non si applica a materiali manomessi da persona non autorizzata o danneggiati a causa di uso improprio. Gli oggetti in garanzia sono riparati senza spese a carico del cliente, fatte salve le spese di spedizione.

Crick
software

auxilia
www.auxilia.it

Via Vaccari, 72 - 41100 Modena
Tel. 059 216311 Fax: 059 220543
info@auxilia.it