

Supporti Sensitrac

Questi supporti, grazie ad una ventosa particolarmente efficace, si fissano istantaneamente e saldamente al piano; con un semplice gesto e possono essere rimossi con facilità in qualunque istante.

Quando distonie e movimenti incontrollati sono una caratteristica rilevante della difficoltà dell'utente, la base dei Sensitrac assicura un fissaggio a superfici di legno, plastica, vetro o metallo capace di resistere agli urti involontari.



I Sensitrac sono costruiti in metallo e sono dotati di una superficie antiscivolo alla quale aderisce uno speciale tessuto adesivo, fornito nella confezione per essere applicato all'ausilio da ancorare.

Sensitrac con braccio orientabile



Permette di ancorare:

- sensori come Big, Jelly Bean, Square pad, Joggle grande, Joggle medio;
- ausili per la comunicazione di piccole dimensioni come BigMack, Big Step-by- Step, Little Mack, Little Step-by-Step; tastiere ridotte come WinMini.

Questo supporto è dotato di un braccio snodato che consente di regolare la posizione del sensore o dell'ausilio, inclinandolo secondo diversi angoli per favorire l'accesso motorio.

Il piccolo pannello superiore è scorrevole e può essere facilmente rimosso dal braccio ruotando il **gancio metallico** che lo trattiene.



In alcuni casi (ad esempio nell'uso di questo Sensitrac con più utenti) può essere utile acquistare dei pannelli addizionali, uno per ciascun ausilio che è necessario usare con frequenza. Basterà rimuovere il pannello a cui è ancorato un certo ausilio e farne scorrere un altro, con un altro ausilio, nelle apposite guide.

Sensitrac con braccio orientabile può sostenere un peso fino a 5 kg. Non cercate di fissare oggetti con una superficie troppo larga (ad esempio una tastiera standard) perché potreste comprometterne la stabilità e la sicurezza.



Istruzioni

1. appoggiate il Sensitrac al piano in una posizione comoda per lavorare: in ogni momento potete sollevare e spostare il Sensitrac semplicemente facendo leva con un dito sotto la parte di ventosa che sporge dalla base;
2. fate ruotare il gancio metallico che si trova di lato al pannello superiore;
3. fate slittare il pannello sulle guide ed estraetelo;
4. applicate al sensore o all'ausilio la placca il tessuto adesivo fornito in dotazione e ancoratelo alla superficie del pannello;
5. riposizionate il pannello e fate ruotare il gancio per trattenerlo;
6. agite sulle due manopole per modificare inclinazione e angolo.

Supporto Sensitrac piatto

Per un ancoraggio saldo, semplice e veloce di:

- sensori come Big, Jelly Bean, Square pad, Joggle grande, Joggle medio;
- ausili per la comunicazione di piccole dimensioni come BigMack, Big Step-by-Step, Little Mack, Little Step-by-Step.



Il sistema a ventosa particolarmente stabile rende possibile fissare e staccare velocemente sensori e piccoli ausili per la comunicazione dal piano d'appoggio.

Il sensore o l'ausilio aderiscono al Sensitrac attraverso lo speciale tessuto adesivo fornito nella confezione.

Istruzioni

1. appoggiate il Sensitrac al piano in una posizione comoda per lavorare: in ogni momento potete sollevare e spostare il Sensitrac semplicemente facendo leva con un dito sotto la parte di ventosa che sporge dalla base;
2. applicate al sensore o all'ausilio la placca il tessuto adesivo fornito in dotazione e ancoratelo alla superficie di Sensitrac.

Manutenzione

L'accumularsi di sporcizia e polvere sulla ventosa compromette la solidità del fissaggio. Di tanto in tanto sarà perciò necessario pulire accuratamente la superficie in gomma per assicurare un ancoraggio saldo al piano. Utilizzate una spugna o un panno morbido inumiditi con un prodotto detergente per vetri. Abbiate sempre cura di posizionare SensiTrac su una superficie ben pulita.



Garanzia

Auxilia garantisce che tutti i propri prodotti sono esenti da difetti nei materiali impiegati e nelle lavorazioni, per un periodo di 24 mesi dalla data di ricevimento del materiale da parte del cliente. Questa garanzia non si applica a materiali manomessi da persona non autorizzata o danneggiati a causa di uso improprio. Gli oggetti in garanzia sono riparati senza spese a carico del cliente, fatte salve le spese di spedizione.

Per ulteriori informazioni contattare:

auxilia

Auxilia s.a.s.

Via Vaccari, 72 - 41100 Modena

Tel. 059 216311 Fax 059 220543 e-mail info@auxilia.it