

# ***Switch Click***

*Versione PS/2 e seriale*



## ***Manuale d'Uso***

Traduzione a cura di Auxilia

auxilia

## Introduzione:

---

**SwitchClick** permette di esercitare l'azione del *click*, normalmente affidata al pulsante sinistro del mouse, attraverso la pressione di un sensore di grandi dimensioni. La funzione di SwitchClick è identica al *click* del mouse standard.

**SwitchClick** viene usato in due situazioni:

- quando si debba usare un programma a scansione che prevede l'uso del *click*
- quando utenti che fanno uso di trackball o altri emulatori di mouse abbiano difficoltà ad azionare il pulsante standard per il *click* e abbiano necessità di un sensore per questa funzione.

**SwitchClick** esiste in due versioni:

- per mouse seriale (cod. #5001)
- per mouse tipo PS/2 (cod. #5002)

**Non è possibile collegare un mouse seriale alla versione di SwitchClick per PS/2 e, viceversa, un mouse PS/2 alla versione seriale.**

## Per collegare SwitchClick seguite le seguenti istruzioni:

---

1. Accendete il computer e avviate il programma con il quale desiderate lavorare.
2. Assicuratevi che il software caricato riconosca il *click* del mouse (se si tratta di un programma a scansione assicuratevi che accetti il *click* come comando di conferma per la scansione).
3. Uscite dal programma e spegnete il computer.
4. Collegate ora SwitchClick al computer e collegate il mouse standard a SwitchClick.
5. Ora riaccendete il computer.
6. Assicuratevi che il mouse standard funzioni ancora come prima. Se non fosse così, controllate i valori standard del computer relativi al funzionamento del mouse (alla voce **Mouse** all'interno del Pannello di Controllo di Windows).
7. Adesso SwitchClick dovrebbe funzionare come il *click* del mouse standard.

---

### **Sensori diversi:**

Sul lato di SwitchClick può essere collegato qualunque sensore singolo dotato di spina minijack standard. Se la superficie di SwitchClick non è adatta alle capacità motorie dell'utente, collegate un altro sensore di forma idonea: la funzione rimarrà sempre la medesima.

---

## Cosa fare se SwitchClick non funziona:

---

1. Se state usando un programma a scansione, assicuratevi che sia configurato per accettare il *click* del mouse come segnale di conferma.
2. Assicuratevi di aver collegato tutto correttamente: SwitchClick al computer e il mouse a SwitchClick.
3. Se avete un computer portatile, assicuratevi che sia correttamente configurato per il funzionamento di un mouse esterno.

Se il problema di funzionamento persiste, contattate Auxilia.

## Garanzia:

---

Auxilia garantisce che tutti i propri prodotti sono esenti da difetti nei materiali impiegati e nelle lavorazioni, per un periodo di 24 mesi dalla data di ricevimento del materiale da parte del cliente.

Questa garanzia non si applica a materiali manomessi da persona non autorizzata o danneggiati a causa di uso improprio.

Gli oggetti in garanzia sono riparati senza spese a carico del cliente, fatte salve le spese di spedizione.

---

*SwitchClick è prodotto da: T.A.S.H. Inc., Ontario, Canada.*

---

Per ulteriori informazioni contattare:

**auxilia**

**AUXILIA s.a.s.**

**Via Vaccari, 72 - 41100 Modena**

**Tel. 059 216311 - Fax 059 220543 - email: [info@auxilia.it](mailto:info@auxilia.it)**