

TalkTrac™ Plus con Livelli

Istruzioni

TalkTrac™ Plus con Livelli è un ausilio portatile per la comunicazione, unico nel suo genere:

- e' facile da programmare e semplice da usare
- ha una memoria complessiva per i messaggi di 65 secondi
- possiede quattro messaggi e due livelli di registrazione (in totale può contenere fino a 8 messaggi)
- possiede quattro tasti-aree della dimensione di 1,87 cm. x 1,25 cm.
- il volume è regolabile
- si ricarica con il caricabatteria fornito in dotazione
- e' dotato di due fasce da polso

Il TalkTrac™ con Livelli è un ausilio per la comunicazione a quattro messaggi che può essere facilmente indossato al polso.

Il suo utilizzo richiede la capacità di selezionare piccole aree per la attivazione di messaggi registrati. Se necessario, il TalkTrac può funzionare anche come ausilio a singolo messaggio: basterà registrare la medesima frase o parola in tutte e quattro le aree e inserire un overlay privo dei segni di separazione dei tasti.

Ciascuno dei quattro messaggi può essere rapidamente modificato. A titolo di esempio, sono inclusi nella confezione due overlay già pronti: uno mostra un possibile uso del TalkTrac durante una lezione di storia e l'altro contiene messaggi per la conversazione nell'attività del "circle time"

Gli utenti che dispongono del programma di Mayer-Johnson® *Boardmaker* possono scaricare gli overlay di TalkTrac dal sito www.ablenetinc.com/support/download.html.

La confezione di TalkTrac™ con Livelli contiene:

- due fasce da polso regolabili
- caricabatteria/riduttore
- due overlay di esempio con simboli

Istruzioni d'uso

Per registrare un messaggio

1. Premete e rilasciate il pulsante di registrazione - si accenderà la piccola luce di registrazione.
2. Con un dito, premete una casella e mantenete la premuta - la luce di registrazione lampeggerà – mentre registrate il vostro messaggio. Terminata la parola o la frase, rilasciate. Ripetete questa operazione per gli altri messaggi.
3. Quando avete terminato la registrazione di tutte e quattro le caselle, premete e rilasciate il pulsante di registrazione - la luce di registrazione si spegnerà.
4. Per sapere di quanti secondi disponete per i messaggi in ciascuna area, consultate più avanti il paragrafo: **Per modificare i livelli**

Per ascoltare un messaggio registrato

1. Premete e rilasciate una delle caselle in cui avete registrato un messaggio.

Per regolare il volume

TalkTrac™ Plus con livelli ha due impostazioni del volume. Cambiate il volume premendo contemporaneamente entrambe le posizioni dei messaggi che riportano il simbolo ■.

Per cambiare livello

Il vostro TalkTrac™ Plus ha due livelli di registrazione per ciascuna delle sue quattro aree. Ciò significa che voi potete registrare 4 messaggi sul livello 1 e altri 4 messaggi sul livello 2. Quando regolerete il TalkTrac™ Plus per funzionare con i messaggi del livello 1, dovrete inserire l'overlay con i simboli corrispondenti a quei messaggi; quando lo regolerete per funzionare con i messaggi del livello 2, dovrete sostituire l'overlay con quello corrispondente. Per cambiare livello, dovrete premere contemporaneamente le caselle dei messaggi che riportano il simbolo ●.

Il livello 1 è indicato, nella spia luminosa di registrazione, da una luce verde, con lampeggiamenti singoli. Il livello 2 è indicato da due lampeggiamenti in successione della stessa luce verde.

La durata dei messaggi registrabili per i due livelli è la seguente:

- **livello 1:** le prime tre caselle dei messaggi hanno, ciascuna, una memoria di circa 7 secondi; l'ultima casella ha una memoria di circa 19 secondi
- **livello 2:** tutte e quattro le caselle hanno circa 7 secondi ciascuna di memoria.

Ricarica della batteria (Figura 2)

TalkTrac™ Plus con Livelli è dotato di una batteria ricaricabile.

Prima di utilizzare l'ausilio, tenete in carica la batteria per 24 ore.

Per prestazioni ottimali della batteria, vi consigliamo di caricare il TalkTrac™ durante la notte – quindi per 12 ore – tutti i giorni, inserendo il riduttore nell'apposita presa per la ricarica, che si trova sul lato dell'ausilio.

Se vi capitasse di mantenere in carica il TalkTrac™ Plus più a lungo, non preoccupatevi: non è possibile sovraccaricare la batteria.

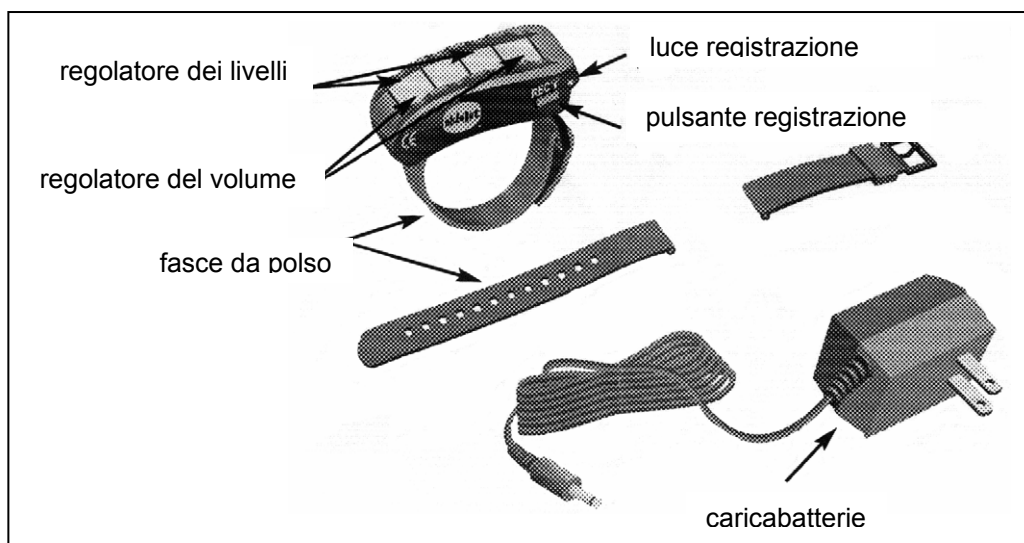


Figura 1

Nota: il caricabatterie fornito in dotazione è di forma leggermente diversa da quello indicato in figura e possiede tre differenti riduttori: non potete sbagliare perché solo uno si inserisce esattamente nella presa.

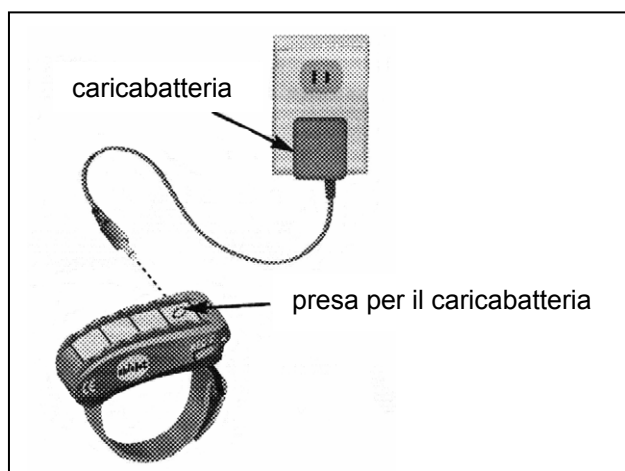


Figura 2



Figura 3

Avviso di batteria scarica

L'esaurimento della carica della batteria viene segnalato da una serie di doppi lampeggiamenti della luce di registrazione che avvengono subito dopo che è stata premuta una delle caselle contenenti i messaggi. Vi raccomandiamo di ricaricare l'ausilio entro quattro ore, dal momento in cui la luce inizia a lampeggiare. In ogni caso, se la batteria non viene ricaricata e il comunicatore si spegne, i messaggi non andranno perduti: essi saranno nuovamente attivi una volta che la ricarica sarà stata effettuata. Se la batteria si scarica del tutto, sarà necessario tenere il TalkTrac™ Plus sotto carica per 24 ore.

La fascia regolabile

TalkTrac™ con Livelli dispone di due fasce da polso ed è adattabile a molti cinturini per orologi, attualmente in commercio (di 16-20 mm.). Questa caratteristica consente di adattarlo a specifiche esigenze degli utenti. Per gli utenti con un polso più grande, o che richiedano una fascia che non si possa rimuovere facilmente, è inclusa una seconda fascia.

Come utilizzare la seconda fascia da polso

1. Utilizzate un piccolo cacciavite per allentare i perni a molla, spingendo entrambe le punte verso l'interno. I perni si trovano nella parte inferiore del TalkTrac™ Plus, dove la fascia da polso si unisce all'incasso. **Nota:** i perni sono a molla e, durante questa operazione, potrebbero uscire dalla fascia.
2. Togliete i perni dalla fascia da polso.
3. Inserite i perni nella seconda fascia da polso, come mostra la figura 3.
4. Attaccate le due parti della fascia ai due fori per l'inserimento dei perni, nella parte inferiore dell'incasso, inserendo, per prima cosa, un'estremità di entrambi i perni in uno dei fori.
5. Con un piccolo cacciavite, premete l'altra estremità del perno e inserite la punta nel foro della fascia corrispondente, che si trova nella parte inferiore dell'incasso.
6. Per attaccare l'altra estremità della fascia, ripetete i passi 4 e 5.

Garanzia

AbleNet offre una garanzia di due anni su tutti i prodotti di AbleNet. Per ulteriori informazioni, contattate il distributore italiano:

AUXILIA s.a.s.

Via Vaccari, 72 - 41100 MODENA
Tel: 059/216311 - Fax: 059/220543

Email: info@auxilia.it

Sito internet: www.auxilia.it

Nota: questo prodotto NON è resistente all'acqua! Un eventuale contatto con liquidi potrebbe danneggiarlo gravemente!