

# TECH TALK™ e TECH SPEAK™

Ausili di comunicazione con livelli



(prodotti da Advanced Multimedia Devices, Inc., U.S.A.)

---

TECH™ sono ausili di comunicazione integrati, dotati di 2, 4 o 6 livelli di registrazione, in grado di contenere fino a 192 messaggi della durata di 2 secondi ciascuno (4 secondi nelle versioni con memoria estesa).  
TECH™ sono semplicissimi da utilizzare: basta accendere l'ausilio, regolare il volume e selezionare il livello desiderato.

## *Installazione delle batterie*

---

1. Assicuratevi che l'ausilio sia spento, ruotando la manopola del volume in senso antiorario.
2. Capovolgete l'ausilio, e appoggiatelo su una superficie stabile.
3. Con l'aiuto di un cacciavite, rimuovete la vite di fissaggio, per accedere al vano delle batterie.
4. Rimuovete le batterie esaurite e sostituitele con quattro batterie AA nuove; si consiglia l'utilizzo di batterie alcaline. Prestate attenzione alla polarità delle batterie; la posizione corretta è indicata nel vano porta-pile.

**NON BUTTATE LE BATTERIE SCARICHE NELLA SPAZZATURA, UTILIZZATE GLI APPOSITI CONTENITORI DI RICICLAGGIO.**

5. Riposizionate la copertura in plastica, facendola aderire lungo il bordo. Fissate di nuovo la vite

## *Registrazione dei messaggi*

---

**Nota: è importante che durante la registrazione dei messaggi il microfono non sia coperto dalla tabella cartacea o da altri impedimenti.**

Per registrare un messaggio seguite queste indicazioni:

- Accendete l'ausilio, ruotando in senso orario la manopola del volume.
- Posizionate la manopola in posizione intermedia rispetto agli estremi minimo-massimo di regolazione del volume.
- Selezionate il livello corrispondente alla tabella di simboli che desiderate registrare.
- Premete e mantenete premuto il tasto rosso **Rec**;
- Contemporaneamente premete e mantenete premuto il tasto corrispondente al messaggio da registrare parlando vicino al microfono; terminata la registrazione del messaggio, rilasciate i due pulsanti.
- Quando parlate, avvicinatevi a circa dieci centimetri dal microfono. Potete riascoltare immediatamente il messaggio registrato; se la riproduzione risultasse "lontana" o tagliata, all'inizio o alla fine del messaggio, ripetete la procedura.

## *Riproduzione dei messaggi*

---

Seguite queste semplici indicazioni:

- Accendete l'ausilio, ruotando la manopola del volume in senso orario
- Regolate il volume al livello desiderato, con la stessa manopola
- Scegliete il livello corrispondente alla tabella di comunicazione utilizzata
- Premete la casella corrispondente al messaggio da riprodurre.

## *Le tabelle di comunicazione*

---

La sostituzione delle tabelle cartacee è una operazione abbastanza semplice: basta sfilare dall'alto la tabella dall'ausilio ed inserirne una nuova nella stessa feritoia.

Per la preparazione delle tabelle di comunicazione potete utilizzare parole, disegni, fotografie o simboli. Sistemi grafici e linguaggi simbolici, come Bliss, PCS, PIC, Core e altri, possono costituire il materiale di base per la preparazione delle tabelle. La scelta del materiale visivo deve essere orientata dalle esigenze e dalle abilità dell'utente.

Per quanti avessero maggiore esperienza con gli interventi di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (C.A.A.) e nell'uso del computer, segnaliamo il programma BoardMaker, prodotto dalla Majer-Johnson: è un software concepito per facilitare l'organizzazione del materiale visivo e la preparazione delle tabelle. Il programma è corredato della completa libreria di simboli P.C.S. .

## *Pulizia dell'ausilio*

---

**Non immergete l'ausilio in acqua! I TECH™ possono resistere alle gocce di pioggia ma subirebbero un grave danno se l'acqua entrasse dalle feritoie dell'altoparlante o dalle prese presenti sul pannello.**

Per pulire l'ausilio utilizzate una spugna leggermente umida; se necessario, la superficie della spugna può essere inumidita con sapone neutro. Utilizzate solo acqua fredda. Asciugate poi accuratamente.

## *Cura e manutenzione dell'ausilio*

---

Tenete l'ausilio spento quando non utilizzato.

Se TECH™ sembra non funzionare correttamente seguite queste indicazioni:

- Controllate che le batterie siano installate con la corretta polarità
- Controllate che l'ausilio sia acceso e che vi sia effettivamente un messaggio associato ai tasti in quel livello
- Assicuratevi che non vi siano ostruzioni alla pressione dei tasti
- Spegnete l'ausilio, attendete venti secondi, riaccendetelo e riprovate.
- Sostituite le batterie. Utilizzate sempre batterie alcaline.

## *Garanzia*

---

Auxilia garantisce che tutti i propri prodotti sono esenti da difetti nei materiali impiegati e nelle lavorazioni, per un periodo di 24 mesi dalla data di ricevimento del materiale da parte del cliente. Questa garanzia non si applica a materiali manomessi da persona non autorizzata o danneggiati a causa di uso improprio. Gli oggetti in garanzia sono riparati senza spese a carico del cliente, fatte salve le spese di spedizione.



Via Vaccari, 72 – 41100 Modena  
Tel.: 059 216311 - Fax: 059 220543  
Email: [info@auxilia.it](mailto:info@auxilia.it)