

(prodotti da Advanced Multimedia Devices, Inc., U.S.A.)

TECH/FOUR è un ausilio di comunicazione integrato, dotato di 1 livello di registrazione, in grado di contenere fino a 4 messaggi della durata di 8 secondi ciascuno.

TECH/FOUR è semplicissimo da utilizzare: basta accendere l'ausilio, regolare il volume e premere l'immagine per attivare il messaggio corrispondente.

Installazione delle batterie

1. Assicuratevi che l'ausilio sia spento, ruotando la manopola del volume in senso antiorario.
2. Capovolgete l'ausilio, e appoggiatelo su una superficie stabile.
3. Con l'aiuto di un cacciavite, rimuovete la vite di fissaggio, per accedere al vano delle batterie.
4. Rimuovete le batterie esaurite e sostituitele con quattro batterie AA nuove; si consiglia l'utilizzo di batterie alcaline. Prestate attenzione alla polarità delle batterie; la posizione corretta è indicata nel vano porta-pile.

NON BUTTATE LE BATTERIE SCARICHE NELLA SPAZZATURA, UTILIZZATE GLI APPOSITI CONTENITORI DI RICICLAGGIO.

5. Riposizionate la copertura in plastica, facendola aderire lungo il bordo. Fissate di nuovo la vite.

Registrazione dei messaggi

Nota: è importante che durante la registrazione dei messaggi il microfono non sia coperto dalla tabella cartacea o da altri impedimenti.

Per registrare un messaggio seguite queste indicazioni:

- Accendete l'ausilio, ruotando in senso orario la manopola del volume.
- Posizionate la manopola in posizione intermedia rispetto agli estremi minimo-massimo di regolazione del volume.
- Premete e mantenete premuto il tasto rosso **Rec**;
- Contemporaneamente premete e mantenete premuto il tasto corrispondente al messaggio da registrare parlando vicino al microfono; terminata la registrazione del messaggio, rilasciate i due pulsanti.
- Quando parlate, avvicinatevi a circa dieci centimetri dal microfono. Potete riascoltare immediatamente il messaggio registrato; se la riproduzione risultasse "lontana" o tagliata, all'inizio o alla fine del messaggio, ripetete la procedura.
- Tutti i rimanenti pulsanti possono essere programmati allo stesso modo.

Collegamento sensori esterni

Il TECH/FOUR è predisposto per il collegamento di sensori esterni (non inclusi nella confezione). Le quattro prese per sensori sul retro dell'ausilio corrispondono alle quattro aree divise dalla griglia sulla superficie del TECH/FOUR. Le prese per sensori possono essere usate come ingresso per sensori esterni da utilizzare per selezionare a distanza i pulsanti corrispondenti presenti sulla superficie dell'ausilio. E' possibile altresì utilizzare queste prese come uscite: in particolare per collegare, tramite appositi cavetti (non inclusi), dei dispositivi esterni azionabili con un basso voltaggio (**al massimo di 6 volts**), come per esempio dispositivi per il controllo ambientale, ed utilizzare le quattro aree sensibili del TECH/FOUR al posto dei sensori.

ATTENZIONE: il TECH-FOUR non è in grado di azionare giocattoli o altri dispositivi motorizzati: l'uso improprio in tal senso potrebbe danneggiare l'ausilio stesso.

Riproduzione dei messaggi

Seguite queste semplici indicazioni:

- Accendete l'ausilio, ruotando la manopola del volume in senso orario
- Regolate il volume al livello desiderato, con la stessa manopola
- Premete la casella corrispondente al messaggio da riprodurre.

Le tabelle di comunicazione

La sostituzione delle tabelle cartacee è una operazione abbastanza semplice: basta sfilare dall'alto la tabella dall'ausilio ed inserirne una nuova nella stessa feritoia.

Per la preparazione delle tabelle di comunicazione potete utilizzare parole, disegni, fotografie o simboli. Sistemi grafici e linguaggi simbolici, come Bliss, PCS, PIC, Core e altri, possono costituire il materiale di base per la preparazione delle tabelle. La scelta del materiale visivo deve essere orientata dalle esigenze e dalle abilità dell'utente.

Per quanti avessero maggiore esperienza con gli interventi di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (C.A.A.) e nell'uso del computer, segnaliamo il programma BoardMaker, prodotto dalla Majer-Johnson: è un software concepito per facilitare l'organizzazione del materiale visivo e la preparazione delle tabelle. Il programma è corredato della completa libreria di simboli P.C.S. .

Pulizia dell'ausilio

Non immergete l'ausilio in acqua! Il TECH/FOUR può resistere alle gocce di pioggia ma subirebbe un grave danno se l'acqua entrasse dalle feritoie dell'altoparlante o dalle prese presenti sul pannello.

Prima di pulire l'ausilio spegnetelo e rimuovete la tabella cartacea dalla griglia; per pulirlo utilizzate una spugna leggermente umida; se necessario, la superficie della spugna può essere inumidita con sapone neutro. Utilizzate solo acqua fredda. Asciugate poi accuratamente.

Cura e manutenzione dell'ausilio

Tenete l'ausilio spento quando non utilizzato.

Se il TECH/FOUR sembra non funzionare correttamente seguite queste indicazioni:

- Controllate che le batterie siano installate con la corretta polarità
- Controllate che l'ausilio sia acceso e che vi sia effettivamente un messaggio associato ai tasti
- Assicuratevi che non vi siano ostruzioni alla pressione dei tasti
- Spegnete l'ausilio, attendete venti secondi, riaccendetelo e riprovate.
- Sostituite le batterie. Utilizzate sempre batterie alcaline.

Per Assistenza Tecnica, chiamate:

auxilia

Tel.: 059 216311

Fax: 059 220543

Email: info@auxilia.it