

## Manuale di istruzioni



**auxilia**

Auxilia s.a.s.

Viale Carlo Sigonio, 227 - I 41124 Modena

Tel. 059 216311 Fax 059 2157033

info@auxilia.it

[www.auxilia.it](http://www.auxilia.it)



## Campanello di chiamata senza fili

Questo prodotto viene impiegato per consentire di effettuare una chiamata a distanza attraverso un controllo adattato. E' sufficiente premere il bottone sul trasmettitore o attivare un sensore esterno (non incluso) per produrre un suono di chiamata nel ricevitore.

### Istruzioni

Inserite la batteria da 12 Volt 23AE fornita in dotazione nello scomparto del trasmettitore, rispettando la polarità indicata (vedi figura 1).

Inserite tre batterie stilo AA (non fornite in dotazione) nello scomparto del ricevitore rispettando la polarità per ciascuna batteria.

Per produrre il suono di chiamata premete il pulsante incorporato nel trasmettitore o attivate un sensore esterno (non incluso) collegato al trasmettitore.

La spia luminosa sul trasmettitore si accende quando viene effettuata la chiamata.

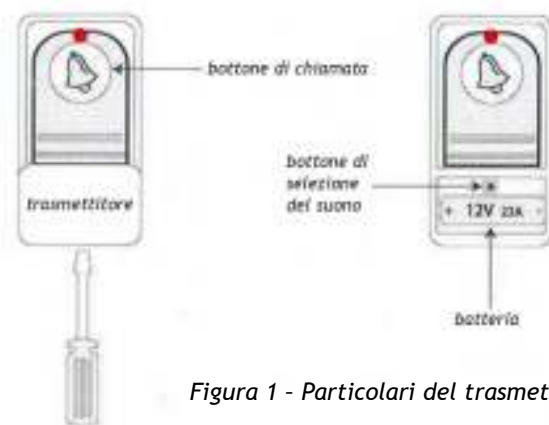


Figura 1 - Particolari del trasmettitore

Se desiderate scorrere le suonerie disponibili premete il bottoncino rosso all'interno del vano batteria del trasmettitore: ad ogni pressione sentirete una suoneria diversa.

### Caratteristiche

- Raggio d'azione 70 metri in campo aperto
- 16 diverse suonerie
- Supporti di fissaggio del ricevitore inclusi
- Suono di chiamata ad alto volume

### Manutenzione e precauzioni

- Pulire con un panno morbido appena umido
- Evitare che trasmettitore e ricevitore subiscano urti
- Non connettere sensori esterni che possano applicare al trasmettitore tensioni elettriche

### Suggerimenti

- Consultate [www.auxilia.it](http://www.auxilia.it) per una panoramica dei sensori disponibili.
- Chiamateci per ogni ulteriore informazione sull'uso del campanello.