

# USB MiniClick

# Tash #5007

---



USB MiniClick è costituito da un pannello con circuito elettronico fissato su una base di Buddy Botton. Quando è attivato, il MiniClick svolge le funzioni del clic sinistro del mouse. L'unità ha una presa USB.

## Attenzione

**Prima di collegare il vostro MiniClick, seguite queste istruzioni:**

1. Avviate il vostro computer e caricate il programma di scansione che desiderate utilizzare. Cercate di acquisire familiarità con esso.
2. Assicuratevi che il vostro computer e il software riconoscano il clic sinistro del mouse, nella parte relativa alla scansione del programma che state utilizzando.
3. Uscite dal vostro programma e spegnete il computer. Collegare il MiniClick.
4. L'estremità rettangolare del cavo si collega a qualsiasi porta USB del vostro computer.
5. Se state utilizzando un mouse esterno, inserite il mouse nel connettore appropriato (PS2, porta seriale USB secondaria del computer o hub USB).

## Funzionamento

1. Riavviate il computer.
2. Seguite le istruzioni che appariranno sullo schermo per mezzo del sistema operativo Windows o Mac, al fine di configurare il vostro sistema alla connessione USB.
3. Il vostro MiniClick funziona ora esattamente come il pulsante sinistro del mouse.

## Garanzia

Auxilia garantisce che tutti i propri prodotti sono esenti da difetti nei materiali impiegati e nelle lavorazioni, per un periodo di 24 mesi dalla data di ricevimento del materiale da parte del cliente. Questa garanzia non si applica a materiali manomessi da persona non autorizzata o danneggiati a causa di uso improprio. Gli oggetti in garanzia sono riparati senza spese a carico del cliente, fatte salve le spese di spedizione.

Auxilia s.a.s.

[www.auxilia.it](http://www.auxilia.it)

Via Vaccari, 72 - 41100 MODENA

Tel: 059/216311 Fax: 059/220543 Email: [info@auxilia.it](mailto:info@auxilia.it)